

Conveen® Security+ urinpåse

Faktablad

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care



Praktisk och tömbar lösning för att kontrollera urinblåsan

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; allt ifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. Conveen Security+ urinuppsamlingspåse är, i kombination med alla typer av kvarliggande urinkatetrar och urindroppssamlare (uridom), en mycket praktisk lösning för att kontrollera urinblåsan.

Fördelarna med en tömbar påse är att risken för infektion minskar (slutet system), den behöver inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Alla påsar är försedda med backventil mellan påse och slang.

Benpåsen finns i 3 volymer och töms med hjälp av en klämma som är lätt att hantera med en hand. Sängpåsen rymmer 2 liter och dess tvåstegsutlopp kan öppnas med en hand och ger bra kontroll vid tömning. Både klämma och tvåstegsutlopp signalerar tydligt om de är öppna eller stängda. Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

Framsidan är transparent och volymgraderad (gäller ej 350 ml påsen). Benpåsens baksida har ett hudvänligt och mjukt non-woven material.

Om slangen böjs kraftigt, rinner urinen fritt eftersom den är knickfri, liksom återtar ursprunglig form. Om du klipper av en slang, spara så mycket som möjligt av den släta delen, för att underlätta påtryckning av konnektor. Benpåsens slang finns i olika längder och som avklippbar med lös konnektor eller med fast konnektor. Sängpåsens slang är avklippbar och ligger löst i förpackningen med fast konnektor. Konnektorn passar till marknadens förekommande katetrar och urindroppssamlare och är lätt att ta av.

Artikelnummer, längd, antal och volym etc

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml	Slanglängd cm	Förp styck	Coloplast art nr	
Benpåse	ja	nej	350	30	30	051640	
	ja	nej	500	30	30	051600	
	ja	nej	500	50	30	051610	
	ja	nej	750	30	30	051660	
	ja	nej	750	50	30	051670	
Conveen Security+	Benpåse	nej	ja	350	30	30	051641
		nej	ja	500	6	30	210220
		nej	ja	500	30	30	051601
		nej	ja	500	50	30	051611
		nej	ja	750	30	30	051661
	nej	ja	750	50	30	051671	
Konnektor					1	430N2303	



PVC- & ftalatfri

Kontakta Coloplast kundservice vid funderingar: 0300-332 99. På www.coloplast.se finns mer information om våra urinpåsar och övriga produkter.

Innehåll

Conveen Security+ är en medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDD 93/42/EEC. Produkten har utvärderats enligt de krav som ställs på medicintekniska produkter. Enligt nuvarande kunskap, anses denna produkt vara giftfri. Conveen Security+ består huvudsakligen av polymermaterial.



Produkt

Polyeten (PE), CAS 9002-88-4
Poly (etylen-akryl) syra (EAA), CAS 9010-77-9
Eten-vinylacetat (EVA), CAS 24937-78-8
Eten metylakrylat (EMA), CAS 97-63-2
Polypropen (PP), CAS 9003-07-0
Titandioxid, CAS 13463-67-7
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), CAS 9003-56-9
Termoplastiska elastomerer (TPE)
Pigment för polymerer
Pigment för utskrift

Produktförpackning

-

Avdelningsförpackning

100% jungfruligt material

Transportförpackning

100% återvunnet material

PVC- &
ftalatfri

Avfallshantering och miljöpåverkan

Produkt:

Privat kan produkten slängas med övrigt hushållsavfall. Lokala avfallsregler styr avfallshantering och ska följas.

På sjukhus ska produkten slängas enligt rekommenderade föreskrifter och på godkänd anläggning.

Följande avfallskod kan användas enligt europeiska avfallskatalogen (EWC) och EU-direktiv 75/442/EEC:

18 01 04 00 avfall som inte kräver särskilda åtgärder med tanke på förebyggande av infektion (tex förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor). Om infektionsrisk föreligger och produktavfallet behöver hanteras enligt särskilda krav ska andra avfallskoder användas. Ansvaret för klassificering ligger hos den som hanterar avfallet.

Baserat på toxikologiska data om produktmaterialet, bedöms inga ekotoxikologiska effekter uppstå. Produkten är inte biologiskt nedbrytbar, varför rekommendationen är att inte kasta den på soptippen. Eftersom produkten har varit i kontakt med kroppsvätskor (blod, urin, avföring) ska den inte återvinnas.

Vid förbränning under kontrollerade förhållanden bildas koldioxid (CO₂), vatten (H₂O) och kväveoxid (NO₂).

Förbränning alstrar energi och därför rekommenderas avfallsförbränning med energiutvinning. Okontrollerad och ofullständig förbränning kan leda till bildande av toxiska gaser, tex kolmonoxid (CO), vätecyanid (HCN), Salpetersyra (HNO₃) och polyaromatiska kolväten (PAH).

Redan från allra första början av Coloplast produktutveckling, är miljön alltid en viktig del. Vid val av material, kemikalier och produktionsprocesser värderas den nya produktens påverkan på miljön. Vid utveckling av nya produkter görs en bedömning av produktens totala miljöpåverkan inklusive inköpt råmaterial.

Miljöpåverkan som sker under produktens tillverkningsprocess reduceras genom minimering av ingående material och energi, så väl som emissioner och avfall. Det förekommer ingen signifikant miljöpåverkan vid användning av produkten.

Coloplast nio fabriker är certifierade enligt ISO 14001.

Förpackning:

Coloplast rekommenderar att förpackningsmaterial i första hand går till återvinning och i andra hand till avfallsförbränning med energiutvinning pga att förbränning alstrar energi. Lokala avfallsregler ska följas.

Vid förbränning under kontrollerade förhållanden bildas koldioxid (CO₂) och vatten (H₂O). Okontrollerad och ofullständig förbränning kan leda till bildande av toxiska gaser, tex kolmonoxid (CO) och polyaromatiska kolväten (PAH).

Avdelnings- och transportförpackningar är med tiden biologiskt nedbrytbara.



Coloplast AB är anslutet till och betalar avgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Benpåse

Conveen Security+
Simpla Plus
Simpla Profile

Fixeringsband

Conveen®
Simpla



Bruksanvisning

23314063 Version 1
Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt. © [2013-06]

Miljöfakta
Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till söföbränning med energutvinning. Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling. Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Indikation

Urinuppsamlingspåse

Information

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Försiktighet!

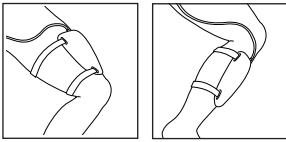
Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

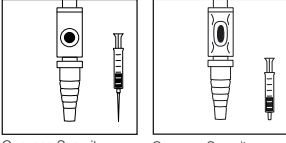
Varning

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.

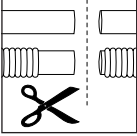
Bruksanvisning för Coloplasts bempåse med fixeringsband från Coloplast

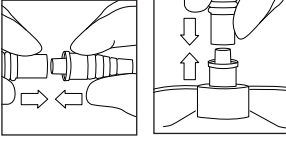
Förberedelser

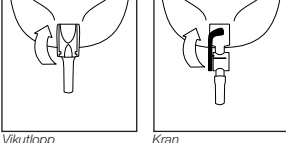
- 

1. Bempåsen har en inlopps slang som kan vara separat eller fäst vid påsen. Slangens längd avgör var påsen kan fästas på benet.
- 

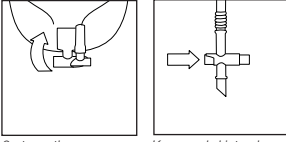
2. Om påsen har en provtagningsport kan urinprov tas vid behov.
Använd en spruta med eller utan nål, beroende på behov.

Conveen Security+ Conveen Security+
Simpla Profile
- 

3. Om slangen saknar inloppsanslutning, eller om själva slangen inte redan är fäst vid påsen, så kan slangen kapas till önskvärd längd. Klipp helt enkelt av slangen med en sax.
När du klipper av en veckad slang ska du lämna kvar så mycket av den släta delen som möjligt. Det gör att anslutningen mellan slangen och kopplingen blir säkrare då kopplingen monteras.
- 

4. Sätt fast konnektorn på slangen genom att trycka och samtidigt vrida in den smala änden av konnektorn så långt in som möjligt i slangen.
För anslutning av slang till påse, tryck och vrid in den avklippta änden av slangen in i påsens inloppskoppling.
- 

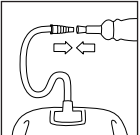
5. Kontrollera att utloppsventilen är stängd.

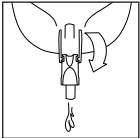
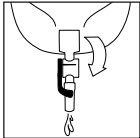
Vikutlopp Conveen Security+ Kran Conveen Security+
Simpla Profile
- 

6. Fäst fixeringsbanden på påsen. Sätt fast påsen på benet. Om fixeringsbanden är för långa kan du klippa av dem till önskad längd.
Conveen/Simpla fixeringsband med silikon
Använd det längre fixeringsbandet till påsens överdel. Om påsen ska fästas vid vaden ska du vira det övre fixeringsbandet i åttaturer bakom och över knät.

2-stegsutlopp Kran med skjutreglage

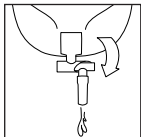
Användning

7.   7. Avlägsna skyddshatten om kopplingen är försedd med en sådan.
- Anslut kopplingen ordentligt till urindroppssamlaren eller katetern. Urinuppsamlingssystemet kan nu användas.

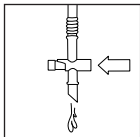
8.   8. Vi rekommenderar att påsen töms då den är något mer än halvfull för att dräneringen ska bli optimal.
- Hävertpåsen Simpla Plus*
Rikta den förlängda utloppsslangen mot toalettstolen. Försäkra dig om att utloppskranen befinner sig i en lägre position än urinpåsen. Tryck på påsen för att starta urinflödet.

Vikutlopp
Conveen Security+

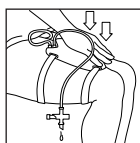
Kran
Conveen Security+
Simpla Profile



2-stegsutlopp



Kran med skjutreglage

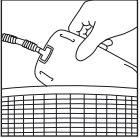


Borttagning

9. Koppla bort påsen från urindroppssamlaren eller katetern.

Lossa fixeringsbanden och ta bort påsen från benet.

Avfallshantering

10.  10. Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer.
- Fixeringsbanden kan återanvändas.
- Töm påsen innan den kasseras.
- Påsen är endast avsedd för engångsbruk och ska kastas i hushållsavfallet.
- Spola inte ned produkten i toaletten.

Symboler



Använd inte produkten om förpackningen är skadad.