

Specialblad för neuro och trauma.

Säkert för patienten. Enkelt för dig.

Klipp mer hår i ett enda svep och ge dina patienter en säker och bekväm klippning med det bredaste specialbladet på marknaden.

- Snabb och effektiv håravkortning vid trauma.
- Avlägsnar huvud- och kroppshår inklusive: grovt, vått, torrt, tjockt och tunt.
- Lämnar minimal stubblängd (mellan 0.5 och 0.7 mm).¹
- Bredaste specialbladet på marknaden vilket underlättar att klippa mer hår i ett enda svep.¹



3M™ Kirurgisk Clipper 9661L
med rörligt huvud för användning
med 3M™ Clipperblad 9690²

Enkel att ladda, använda och rengöra.

Byta blad



Sätta fast

Avlägsna skyddspappret från förpackningen, håll Clippern i 45-graders vinkel och knäpp på 9690-bladet.

Notera: Ett hörbart klick visar att bladet sitter fast säkert.



Avlägsna

Använd tummen för att "knäppa av" det använda bladet över avfallsbehållaren för vassa föremål.

Notera: Använd alltid ett nytt blad till varje patient för att undvika korskontaminering.

Klippa



För framåt

Håll Clippern som en penna med bladet plant eller med en liten vinkel mot huden. Skjut Clipperbladet försiktigt framåt mot patientens hårriktning.

Notera: Använd inte överdrivet tryck för att trycka Clippern mot patientens hud.

Rengöringsalternativ



Blötlägg³

Med Clippern avstängd och bladet avlägsnat, blötlägg Clippern i vatten. Torka Clippern noga innan laddning eller användning.



Eller skölj

Med Clippern avstängd och bladet avlägsnat, skölj Clippern under rinnande vatten. Torka noga innan laddning eller användning.



Torka

Med Clippern avstängd och bladet avlägsnat, torka av Clipperhandtaget med desinfektionsmedel.

Notera: Om du väljer att skölja eller blötlägga, skall sköljning eller blötläggning ske innan desinfektion.



Ladda

Ladda Clippern i 4 timmar innan första användningen. Förvara Clippern avstängd i den anslutna laddningsenheten efter varje användning. Clippern ger ca 160 minuters klipptid med 4 timmars återladdning. När Clippern är laddad lyser lampan grönt. När batteriet behöver laddas, och under laddning, blinkar ljuset gult. Se bipacksedeln för varningar och mer detaljerade instruktioner.

För mer information om 3M™ Kirurgiska Clipper 9661L eller andra produkter från 3M Health Care:

- Kontakta din lokala 3M representant
- Besök www.3M.se/ipd

Art nummer	Produktbeskrivning	Antal per fp	Antal fp per lev fp
9660	3M™ Clipperblad 9660	50	1
9661L	3M™ Kirurgisk Clipper 9661L med rörligt huvud	1	1
9668L	3M™ Laddare för Kirurgisk Clipper 9661L: 9668L	1	1
9667L-E	3M™ Startkit för Kirurgisk Clipper 9667L-E: 3M™ Kirurgisk Clipper 9661L och 3M™ Laddare för Kirurgisk Clipper 9668L (Clipperblad inkluderas ej)	1	1
9690	3M™ Clipperblad 9690 (för huvud och kraftigt kroppshår)	20	1

3M

3M Health Care
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollenuna

¹ Verifierat genom testning på 3M.

² 9690-bladet är ej rörligt vid användning med 3M™ Kirurgisk Clipper 9661L.

³ Uppfyller IPX7 rating – kan sänkas ned i vatten som inte är djupare än en meter i upp till 30 min.

Vänligen återvinn. Tryckt i Europa. © 3M 2016. 3M är ett varumärke inom 3M.

Alla rättigheter reserverade. IPD-PO-SC9690-7003-1-EU-0816 / 70-2011-5771-9