

# Kyltransportförpackning 95.1123

Kyltransportförpackningen möjliggör säker kyltransport av medicinska och biologiska prover som kan frysas.

Förpackningen är inte lämplig för prover som inte får frysas eftersom ett ofruset prov fryses när det placeras i den frysta behållaren.

Förpackningen är fylld med en kylvätska med mycket bra kylförmåga och den har plats för två provrör. Förpackningen är idealisk för våra 10 mL skruvlocksror med diameter på 16 mm.

För en säker transport av flytande prover krävs ett absorptionsmaterial som kan suga upp hela provvolymen. Vi rekommenderar att använda vårt suginlägg med artikelnr 78.671, vilket kan suga upp 10 mL vätska. Placera ett suginlägg i varje provrörsfack.

Skicka kyltransportförpackningen i frigolithöljet för skydd mot värme och stötar.

Transport av biologiskt material, kategori B enligt P650(ADR) kräver tillägg av en ytterförpackning. Sarstedts transportkartong med artikelnr 95.903 är typgodkänd enligt P650(ADR) och kan användas för detta ändamål.



## Bruksanvisning

1. Före användning placeras kyltransportförpackningen i ca -20° C . Kontrollera att kylvätskan är frusen genom att skaka förpackningen.

Det är viktigt att förpackningen fryser **liggande** och utan frigolithölje.

Proverna måste frysas separat och sedan placeras i kyltransportförpackningen.

2. Frys aldrig blod eller skicka blod i frysta förpackningar. Centrifugera alltid först, och frys därefter serum eller plasma före transport.

3. Vi rekommenderar förvaring av kyltransportförpackningen i frysen, så att den alltid är färdig att användas.

4. För att undvika eventuell materialutmattning är användningstiden av kyltransportförpackningen begränsad till 5 år. Tillverkningsdatum(år) är ingjutet i botten på förpackningen.

Vi reserverar oss för tekniska modifikationer  
2007-08-21



Sarstedt AB  
Box 630  
261 26 Landskrona

Tel 0418-295 40  
Fax 0418-182 00  
info@sarstedt.com www.sarstedt.com