

Bordshållare till avfallsburk- tillbehör



- När avfallsbehållaren står t ex på en bricka kan man använda adaptern för att förhindra att avfallsbehållaren välter
- Passar till de flesta Multi-Safe avfallsbehållarna
- Kan fästas på både bord och vagn
- Uppnå optimalt läge för locket, där avvridningsanordningen för flera nålar finns, när behållaren fixeras av adaptern/bordshållaren
- Rengöring kan ske med tvål och vatten
- Desinfektion kan ske med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid tillsats

Följ beskrivningen nedan för att uppnå optimalt läge:

- Vänd avfallsbehållaren upp och ned. Passa in adaptern i fördjupningen i behållarens botten och vrid medurs
- Välj en lämplig plats och bestäm önskad riktning för avvridningsanordningen
- Kontrollera att ytan som adaptern skall fästas på är fri från damm och fett
- Ta bort skyddsfolien från adaptern och tryck från ovansidan fast den på önskat ställe. Hållaren är nu säkert fastlimmad i underlaget
- Vrid för säkerhets skull loss behållaren från adaptern och tryck med handen på den så att du känner att den sitter fast ordentligt
- Den tomma avfallsbehållaren kan nu skruvas på adaptern igen
- Efter att den fyllda behållaren har förslutits, skruvas behållaren moturs så att den lossnar från adaptern

Artikelnummer:	Benämning:	Ø i mm:	Höjd i mm:	Inner/Ytterfp:
95.965.001	Bordshållare, PP	50	10	10/150