

ELSET 'S'

Specialbinda för formlindning av amputationsstumpar



- Mycket elastisk
- Lätt att forma
- Mjuk och smidig av rayon
- Lämplig även för lindning efter scleroterapi eller stripping
- Bindan ska ej sträckas i sin fulla längd vid lindning
- Vaxade ändkanter, ska ej klippas
- Linda alltid hela lindan
- Handtvätt, torkas liggande
- Innehåller latex

Att tänka på vid användandet av Elset 'S'

1. Elset S levereras sträckt och fäst med säkerhetsnålar. Amputationsbindan får därför **inte** sträckas första gången den används.
2. Andra gången Elset S lindas får den endast sträckas med max halva sin längd. Risken är annars stor att bindan dras åt för hårt och stasar.
3. Elset S tvättas i 40 grader, dock helst handtvätt. Den får ej centrifugeras och ska torkas liggande.
4. Elset S går att autoklavera.
5. Om Elset S är för lång - linda då några extra varv. Kanterna är nämligen vaxade och får därför inte klippas av.

Elset 'S'	Bredd x längd	Artikel nr	Avd.förp
Amputationsbinda	10 cm x 12 m	3486S	12 bindor
Amputationsbinda	15 cm x 12 m	3487S	12 bindor



Tillverkas av:
Mölnlycke Health Care
Box 13080
SE-402 52 Göteborg
Sweden

Elset 'S' innehåll:
85% rayon med elastisk
nylonomspunnen tråd av
naturgummilates

Rest efter förbränning:
Koldioxid och vatten.



Förp. innehåll:
-Prod: Polyeten
-Avd: Kartong
-Transp: 80% återvunnen
fiber.

Rest efter förbränning:
Koldioxid och vatten.

Amputations- binda



www.tillquist.se

Huvudkontor

Box 8064, 163 08 Spånga
Besök: Fagerstag. 3
Lev: Fagerstag. 3B, 163 53 Spånga
Fax 08-479 39 99

Filialkontor & produktion

Renvägen 1, 352 45 Växjö
Fax 0470-482 92

Telefon: 08-479 39 00 / 40

e-Mail: info@tillquist.se

Distribueras i Sverige av

SUNNEX TILLQUIST AB: