

TUBIGRIPSTRUMPA - TSSB

Förformat bandage / förbandsstrumpa

Ger en jämt fördelad kompression för behandling av olika typer av enklare cirkulatoriska problem i ben och armar

- Hellång och knälång modell
- Lätt att mäta ut rätt storlek
- Tvättbar (handtvätt)
- Innehåller latex



Användningsområden

Den förformade Tubigripstrumpan har utvecklats för att ge ett gradvis ökat tryck på benet och den kompletterar det välkända Tubigripbandaget på metervara.

Tubigripstrumpa lång är förformad på sådant sätt att den ger ett högre tryck över patientens vrist och vad, än över låret. Denna princip är av värde för att åstadkomma ett bättre venöst återflöde i benen.

Tubigripstrumpan är utomordentligt lämpad för behandling av ödem efter kirurgiska ingrepp på benets vener, scleroterapi och stripping. Passar också som ödemprofylax under gips och som stöd efter avgipsning.

Vid utprovning av strumpa mäts endast vadmängd. Längden är densamma. Längden mäts enkelt ut genom att strumpan läggs på baksidan av benet, runt hälen och fram till stortåns spets. Om strumpan då visar sig vara för lång ska den klippas av motsvarande samma längd.

OBS! Klippas i båda ändarna. Detta för att inte rubba kompressionsfördelningen i strumpan. OBS! Vik aldrig kanten på strumpan.



Eftersom det är klippta kanter i ändarna på strumpan är det ingen kompression de yttersta 2-3 cm. Det gör att patienten inte riskerar något som stasar i knäveck. Se även till att strumpan inte kommer för högt upp på foten, endast stortå toppen ska synas. Då finns kompression från tåbasen.

Tubigripstrumpan är framställd av 100% bomull. En nylonomspunnen mycket elastisk latextråd löper genom förbandet. Strumpan ger därmed ett jämnt fördelat tryck.

TSSB kort	Vadmängd	Artikel nr	Avd.förp
Strumpa B/C	32-36 cm	1472S	10 st strumpor
Strumpa C/D	35-39 cm	1473S	"
Strumpa D/E	38-42 cm	1474S	"
TSSB lång			
Strumpa B/D	32-36 cm	1475S	"
Strumpa C/E	35-39 cm	1476S	"
Strumpa D/F	38-42 cm	1477S	"
Strumpa E/G	41-45 cm	1478S	"
Strumpa X/T	41-45 cm (extra lårvidd)	1471S	"

Materialförteckning på nästa sida ►

Stödförband

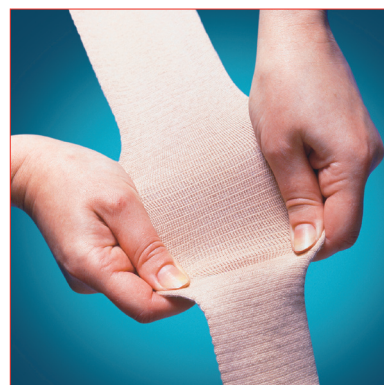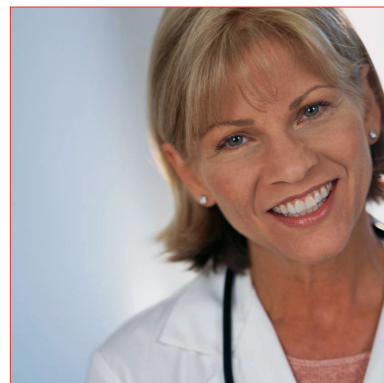


TUBIGRIP

Tubformat elastiskt stöd- och kompressionsförband.



- Används som stödförband istället för elastisk binda
- Invävd elastisk tråd genom hela bandaget ger ett jämt fördelat ryck.
- Appliceras alltid dubbelt
- Måttband finns för val av rätt storlek
- Tvättbar (handtvätt)
- Innehåller latex

Stödförband

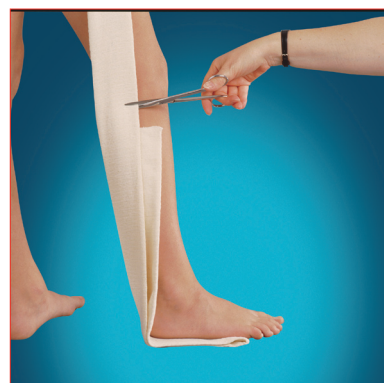

Tubigrip	Bredd i cm	Anv.Område	Artikel nr	Avd.förp
A	4,2-4,8	Fötter & armar, barn	1435S	10 m
B	6,0-6,4	Barn-/små händer	1436S	"
C	6,6-7,2	Händer vuxna	1443S	"
D	7,3-7,9	Armar & underben	1437S	"
E	8,6-9,2	Ben, knän & smala lår	1434S	"
F	9,7-10,3	Kraftiga knän & ordinära lår	1438S	"
G	11,3-12,7	Kraftiga lår	1439S	"
J	16,5-18,4	Liten bål	1440S	"
K	21,5-23,5	Bröstkorg	1441S	"
L	32,5-34-5	Fast fixering av arm	1442S	"
M	37,0-37,5	Fast fixering av arm	1444S	"



Tillverkas av:
Mölnlycke Health Care
Box 13080
SE-402 52 Göteborg
Sweden

TSSB & Tubigrip

Innehåll:

83% oblekt bomull
9% elastodiene
8% polyamid
Nylonomspunnen tråd
av naturgummilates

Rest efter förbränning:
Koldioxid och vatten.



Förpackningar

Innehåll:

- Prod.förp (TSSB):
Polyeten
- Avd.förp: Kartong
- Transp: 80% återvunnen
fiber

Rest efter förbränning:
Koldioxid och vatten.

www.tillquist.se

Huvudkontor

Box 8064, 163 08 Spånga
Besök: Fagerstag, 3
Lev: Fagerstag, 3B, 163 53 Spånga
Fax 08-479 39 99

Filialkontor & produktion

Renvägen 1, 352 45 Växjö
Fax 0470-482 92

Telefon: 08-479 39 00 / 40

e-Mail: info@tillquist.se

Distribueras i Sverige av

SUNNEX TILLQUIST AB: