

# Ethanol Disinfection

## Engångsdukar med hög alkoholkoncentration och detergent



Artikelnr.: 6025067



Artikelnr.: 6025069

### **Snabbverkande desinfektionsmedel Enkel att använda**

#### **Användning**

Använd för desinfektion av medicinska enheter kompatibla med etanol och för desinfektion av kontaktytor, t.ex. i operationssalar, på intensivvårdsavdelningar, undersökningsrum och avdelningar.

Snabbverkande mot vegetativa bakterier och jästsvampar, tack vare hög alkoholkoncentration.

Enligt tester från oberoende laboratorier, Dr. Brill och MikroLab Germany, minskar Wet Wipe Ethanol Disinfection bakterier och jästsvampar.

Testrapport och dokumenterad effektivitet vid 30 sekunders inkubationstid finns tillgängliga på begäran.

#### **Lagring**

Wet Wipes engångsdukar impregnerade med etanol uppfyller kraven i UN 3175, d.v.s. fasta ämnen som innehåller brandfarliga vätskor och är därför undantagna tekniska bestämmelser för lagring och hantering av brandfarliga vätskor. Produkten kan lagras och hanteras som ett fast, brandfarligt ämne.

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

### **Transport**

Nettoinnehållet i en förpackning är mindre än 1 kg fast material innehållande brandfarlig vätska, vilket betyder att produkten kan transporteras som farligt gods i begränsad mängd.

Kartongen är därför LQ-märkt.

### **Artikelnummer**

Engångsdukarna tillverkas i två storlekar.

**Artikelnr. 6025067: Ethanol Disinfection Maxi**

**Kartong med 12 förp. = 240 dukar**

**1 förp. innehåller 20 dukar, 43x30 cm**

**Artikelnr. 6025069: Ethanol Disinfection Mini**

**Kartong med 20 förp. = 500 dukar**

**1 förp. innehåller 25 dukar, 20x30 cm**

### **Innehåll**

Etanol 77 vol- %

Isopropanol 5 vol- %

Detergent <1%

Hållbarhet efter öppningsdatum 30 dagar.

Tillverkas utan parfym, färg och denatureringsmedel.

Tillverkad i Tyskland. Säkerhetsinformation och bruksanvisning finns tillgänglig vid förfrågan.

#### **Wet Wipe A/S**

Vallensbækvej 65  
DK-2625 Vallensbæk  
Tel: +45 43 62 19 43  
info@wetwipe.dk  
www.wetwipe.dk  
CVR: 30207726

**wetwipe®**

M67-061, SE, Ver. 1  
PG, Jan 2019

#### **Återförsäljare**

#### **Mediplast AB**

Box 1004, 212 10 Malmö  
Tel: 020-78 80 35  
mediplast.info@mediplast.com  
www.mediplast.com

**MEDI PLAST®**