

# Chlorine Disinfection

## Engångsdukar med aktivt klor



Artikelnr.: 6025074



Artikelnr.: 6025058

**Allsidigt desinfektionsmedel**  
**Enkelt att använda**  
**Alltid rätt dosering**

**Wet Wipe engångsdukar Chlorine Disinfection är indränkta med pulverbaserad klor**

Förpackningen innehåller en påse med vätska. När påsen öppnas, rinner vätskan ut över engångsdukarna, som är klara för användning efter 7 minuter. Med Wet Wipe Chlorine Disinfection uppnår du optimal och enkel desinfektion.

**Bruksanvisning:**

- 1. Slå på mitten av förpackningens baksida.**
- 2. Låt påsen ligga med framsidan neråt i minst 7 minuter.**
- 3. Vänd på den. Engångsdukarna är klara för användning.**

**Användningsområden**

Desinficerar effektivt mot Norovirus och t.ex. HIV och Hepatit B, vegetativa bakterier, mögel och jästsvampar. Används för desinfektion av ytor för medicinsk utrustning och fastsättningspunkter, t.ex. kontaktpunkter för isolerade patienter.

10 minuters kontakttid.

**Obs**

Engångsdukarna behåller sina desinficerande egenskaper >1000 ppm aktivt klor i 7 dagar efter öppnande. De tillverkas i två storlekar.

**Artikelnr. 6025074: Chlorine Disinfection Maxi**  
Kartong med 24 förp. = 120 dukar  
1 förp. innehåller 5 dukar, 43×30 cm

**Artikelnr. 6025058: Chlorine Disinfection Mini**  
Kartong med 20 förp. = 200 dukar  
1 förp. innehåller 10 dukar, 21×29 cm

**Innehåll**

Detergent < 0,1%  
Aktivt klor > 1000–1200 ppm.

Hållbarhet efter öppningsdatum 7 dagar.

Tillverkad i Tyskland.

Säkerhetsinformation finns tillgänglig vid förfrågan.

Wet Wipe A/S  
Vallensbækvej 65  
DK-2625 Vallensbæk  
Tel: +45 43 62 19 43  
info@wetwipe.dk  
www.wetwipe.dk  
CVR: 30207726

**wetwipe®**

81-050, SE, Ver. 5  
Apr 2018

Återförsäljare  
**Medioplast AB**  
Box 1004, 212 10 Malmö  
Tel: 020-78 80 35  
mediplast.info@mediplast.com  
www.mediplast.com

**MEDI PLAST®**