

# Touch-Test Sensibilitetstest broschyr

Fritt översatt av Catell AB




Utvärdering av både försämrad och förbättrad sensibilitet.

## Touch-Test Sensory Evaluators (Semmes-Weinstein Monofilaments)

Dessa bärbara sensibilitetstest är kalibrerade med en standardavvikelse på 5 % av varje mätning.

- Används för att testa känselnivåer och för att få objektiv data för korrekt bedömning av minskad eller förbättrad sensibilitet.
- Touch-Test Sensory Evaluators är individuellt kalibrerad med en standardavvikelse på 5% av ett förutbestämt tryck. Tråden böjs när tröskelvärdet för maximalt tryck nås.
- Öppna handtaget till en 90° vinkel när testet ska genomföras enligt bilden nedan. När handtaget är stängt kan monofilamentet förvaras säkert i en ficka eller i ett fodral, tråden kommer då att vara skyddad.
- Fördjupningen på handtaget ger ett stadigt och bekvämt grepp.
- Handtaget är markerat med en färgkod som motsvarar trycknivån.
- Utvärderingsresultatet kan registreras på hand- eller fotscreeningsformulären (NC12750-1 och NC12749). Tröskelvärden inkluderar normal sensibilitet, minskad lätt beröring, minskad skyddskänsla, ingen skyddskänsl och förmåga att uppfatta hårt tryck.
- Testen finns tillgängligt i ett handkit (monofilament 2.83, 3.61, 4.31, 4.56 och 6.65), fotkit (monofilament 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07 och 6.65), och ett kit med 20 stycken monofilament för både hand och fot.
- Både hand och fot kit finns tillgängliga som kompletta kit som inkluderar screeningformulären och de färgkodade monofilamenten.
- Varje kit kommer i ett skyddsfodral. Bruksanvisning är inkluderat.
- Individuella sensibilitetstest går att beställa separat, inkluderat 5.07, vilket indikerar förlust av skyddskänsla.
- Informationsvideo med Sensory Evaluators finns tillgängligt på [www.ncmedical.com](http://www.ncmedical.com)

Handtaget öppnas till en 90° vinkel för en enkel applicering och skyddar tråden när den är stängd.

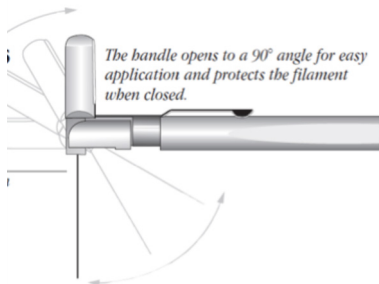

Artikelnummer	Testets storlek	Motståndskraft i gram	Färg	Hand & Dorsal fot nivå	Plantar nivå
NC12775-01	1,65	0,008	Grön	Normal	Normal
NC12775-02	2,36	0,02	Grön	Normal	Normal
NC12775-03	2,44	0,04	Grön	Normal	Normal
NC12775-04	2,83	0,07	Grön	Normal	Normal
NC12775-05	3,22	0,16	Blå	Minskad lätt beröring	Normal
NC12775-06	3,61	0,4	Blå	Minskad lätt beröring	Normal
NC12775-07	3,84	0,6	Lila	Minskad skyddskänsla	Minskad lätt beröring
NC12775-08	4,08	1	Lila	Minskad skyddskänsla	Minskad lätt beröring
NC12775-09	4,17	1,4	Lila	Minskad skyddskänsla	Minskad lätt beröring
NC12775-10	4,31	2	Lila	Minskad skyddskänsla	Minskad lätt beröring
NC12775-11	4,56	4	Röd	Ingen skyddskänsl	Minskad skyddskänsla
NC12775-12	4,74	6	Röd	Ingen skyddskänsl	Minskad skyddskänsla
NC12775-13	4,93	8	Röd	Ingen skyddskänsl	Minskad skyddskänsla
NC12775-14	5,07	10	Röd	Ingen skyddskänsl	Ingen skyddskänsl
NC12775-15	5,18	15	Röd	Ingen skyddskänsl	Ingen skyddskänsl
NC12775-16	5,46	26	Röd	Ingen skyddskänsl	Ingen skyddskänsl
NC12775-17	5,88	60	Röd	Ingen skyddskänsl	Ingen skyddskänsl
NC12775-18	6,10	100	Röd	Ingen skyddskänsl	Ingen skyddskänsl
NC12775-19	6,45	180	Röd	Ingen skyddskänsl	Ingen skyddskänsl
NC12775-20	6,65x	300	Röd	Uppfattar hårt tryck	Uppfattar hårt tryck