



Suma Med Alu

L10

Flytande maskindiskmedel för rengöring i spol - och diskdesinfektorer

Produktbeskrivning

Suma Med Alu är ett koncentrerat, flytande maskindiskmedel speciellt utformat för ett brett spektrum av spol- och diskdesinfektorer samt ultraljudsbad.

Produktegenskaper

Suma Med Alu är ett flytande maskindiskmedel speciellt utformat för ett brett spektrum av spol- och diskdesinfektorer. Produkten passar behoven i många laboratorier och medicinska inrättningar. Formuleringen är skonsam mot mjuka metaller såsom aluminium, koppar och silver.

Produktfördelar


- Säker för användning på aluminium och andra mjuka metaller
- Innehåller kraftfull komplexbildare och alkali som tar bort fet och proteinrik smuts
- För användning i medelhårt till hårt vatten
- Koncentrerad formel med låg användningskostnad

Bruksanvisning

Suma Med Alu appliceras normalt med Diversey automatiska doseringsutrustning eller som ett maskindiskmedel i handtvätt. Det kan dock användas tillsammans med integrerade doseringspumpar om de är monterade. Vid den första användningen ska doseringssystemets pump- och transportrör sköljas för att undvika eventuell kristallisering i dessa rör, som orsakas av att produkterna blandas. För att säkerställa perfekta rengöringsresultat vid medelhårt vatten, dosera med en koncentration på 1,5-3 g/L, beroende på lokala förhållanden på platsen. Torka den medicinska utrustningen före användning. Dessutom måste medicintekniska produkter steriliseras ytterligare om de är invasiva. Speciella handskar och skyddsglasögon eller skyddsglasögon krävs under normala användningsförhållanden.

Användning

Suma Med Alu L10 är ett koncentrerat flytande maskindiskmedel som är speciellt framtaget för användning i ett brett utbud av ultraljudsmaskiner och tvätt- och desinfektionsmaskiner, eller som flytande tvättmedel för manuell tvätt. Speciellt framtagen för användning på mjuka metaller som aluminium, koppar eller silver. Kompatibel med rostfritt stål. Suma Med Alu L10 är en produkt för engångsbruk. Avsedda användare: auktoriserad utbildad personal på en sjukvårdsinrättning. Endast för professionell användning.

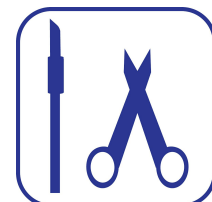



Suma Med Alu

L10

Teknisk information

pH brukslösning (1% lösning vid 20°C): ~ 12

Relativ densitet (g/cm³; 20°C): ≈ 1.28

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och avfallshantering av denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com. Hantera enligt god industriell hygien och säkerhetspraxis. Hålls borta från mat, dryck och djurfoder. Blanda inte med andra produkter om inte Diversey ger råd om detta. Förvaras i slutna originalförpackningar och ska hållas borta från extrema temperaturförhållanden. Produkten är inte avsedd att återanvändas. Endast för professionella användare/specialister.

Varning

Om någon allvarlig incident inträffar i samband med användningen av Suma Med Alu ska användaren rapportera den till Diverseys lokala kontor och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Återanvänd inte. Produkten är inte avsedd för användning på mänsklig hud. Suma Med Alu är inte avsedd att användas på porösa eller alkalikänsliga medicintekniska produkter utom aluminium. Får inte användas på medicintekniska produkter tillverkade av polyetentereftalat (PET). Utan korrekt sterilisering är produkten inte avsedd att användas på invasiva medicinska anordningar som penetrerar vävnad eller tränger in i blodomloppet och inte heller kommer i direkt kontakt med intakta slemhinnor. Använd inte Suma Med Alu L10 på medicintekniska produkter av plast. Andra användningsområden än de som anges rekommenderas inte. Tvätta händerna före raster och i slutet av arbetsdagen. Tvätta ansikte, händer och eventuell exponerad hud noggrant efter hantering. Ta omedelbart av dig alla kontaminerade kläder. Använd personlig skyddsutrustning vid behov. Använd endast med tillräcklig ventilation. Suma Med Alu L10 Innehåller dinatriummetasilikat (natriummetasilikat) och kan orsaka: Hudirritation Allvarlig ögonskada Försiktighetsföreskrifter: Använd ögon- eller ansiktsskydd. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om de finns och är lätta att göra. Fortsätt skölja. Ring omedelbart till en giftcentral, läkare eller doktor.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
100854033	Suma Med Alu L10 200L W1779	Automatisk dos
100854034	Suma Med Alu L10 2x5L W4040	Automatisk dos

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 31/10/2022 sv-SE (K00235)