

# Vastrip® Special

## Originalstrippern



Vastrip® Special är originalet bland Vastrip®-produkterna. Den överlägsna kvaliteten gör den till en av de mest använda varicerstripperna.

Venstripping är ett standardingrepp vid behandling av varicer. Långtidsresultatet av stripping är bättre än med skleroterapi (1) eller enbart hög underbindning (2). Vastrip Special är originalet bland venstrippar för engångsbruk och mer än en miljon produkter har sålts sedan den först lanserades.

Vastrip Special har en spiralformad spets som kan underlätta införandet genom slingriga och svårpasserade vener. Den minsta kulan är en integrerad del av strippern och ytterligare 3 större kulor är inkluderade, vilket ger en möjlighet till att anpassa storleken på kulan till den ven som ska strippas. Strippens kärna av rostfritt stål ger stabilitet vid införandet och stadga under venstrippingen. Ytterroret av polykarbonat gör att strippern lätt glider in i venen och underlättar också undersökningen av venen efter strippingen. Handtaget kan fästas och flyttas på Vastrip Special för att ge extra dragstyrka när venen ska strippas.

- **Säker – mer än en miljon patienter har behandlats med hjälp av Vastrip® Special.**
- **Stabil – vilket underlättar introduktionen och kontrollen under hela ingreppet**
- **Val mellan fyra kulstorlekar (6, 9, 12, 15 mm)**
- **Ett justerbart handtag som ger extra dragstyrka ingår**
- **Spiralformad spets**

# Vastrip® Special


## Förpackning

Vastrip Special levereras i en steril förpackning.




## Kulor

En fast kula och tre avtagbara kulor ger 4 olika storlekar.

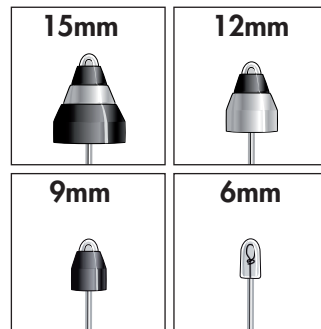

## Handtag

En av de unika komponenterna hos Vastrip Special är det flyttbara handtaget. Handtaget ger extra dragstyrka vid venstrippingen.

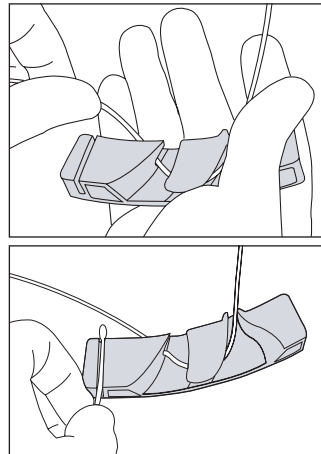

## Beskrivning

### Material

Rostfritt stål (stripperns kärna), polykarbonat (stripperröret och den fasta kulan), acetal (kulorna), ABS (handtaget).

### Sterilisering

Produkterna steriliseras med etylenoxid.

### Engångsbruk

Samtliga komponenter är endast avsedda för engångsbruk. Använd inte produkten om förpackningen är öppnad eller skadad.

### Produktsortiment – Vastrip Special

Ref. 67322 1x10

CE  
0086

STERILE EO



### Referenser:

1. Einarsson E, Eklöf B, Neglén P. Sclerotherapy or surgery as treatment for varicose veins: a prospective randomized study. *Phlebology* 1993;8:22-26
2. Dwerryhouse S, Stripping the long saphenous vein reduces the rate of reoperation for recurrent varicose veins: five-year results of a randomized trial, *Journal of Vascular Surgery*, 1999;29:589-92