




Absorberande ångpermeabelt vidhäftande förband

Alldress är ett självhäftande allt-i-ett-förband som passar till olika svagt till måttligt vätskande sår, antingen som primärt förband eller som ytterförband. Polyuretanfilmen bibehåller en fuktig sårmiljö och skyddar såret mot vatten och kontamination.

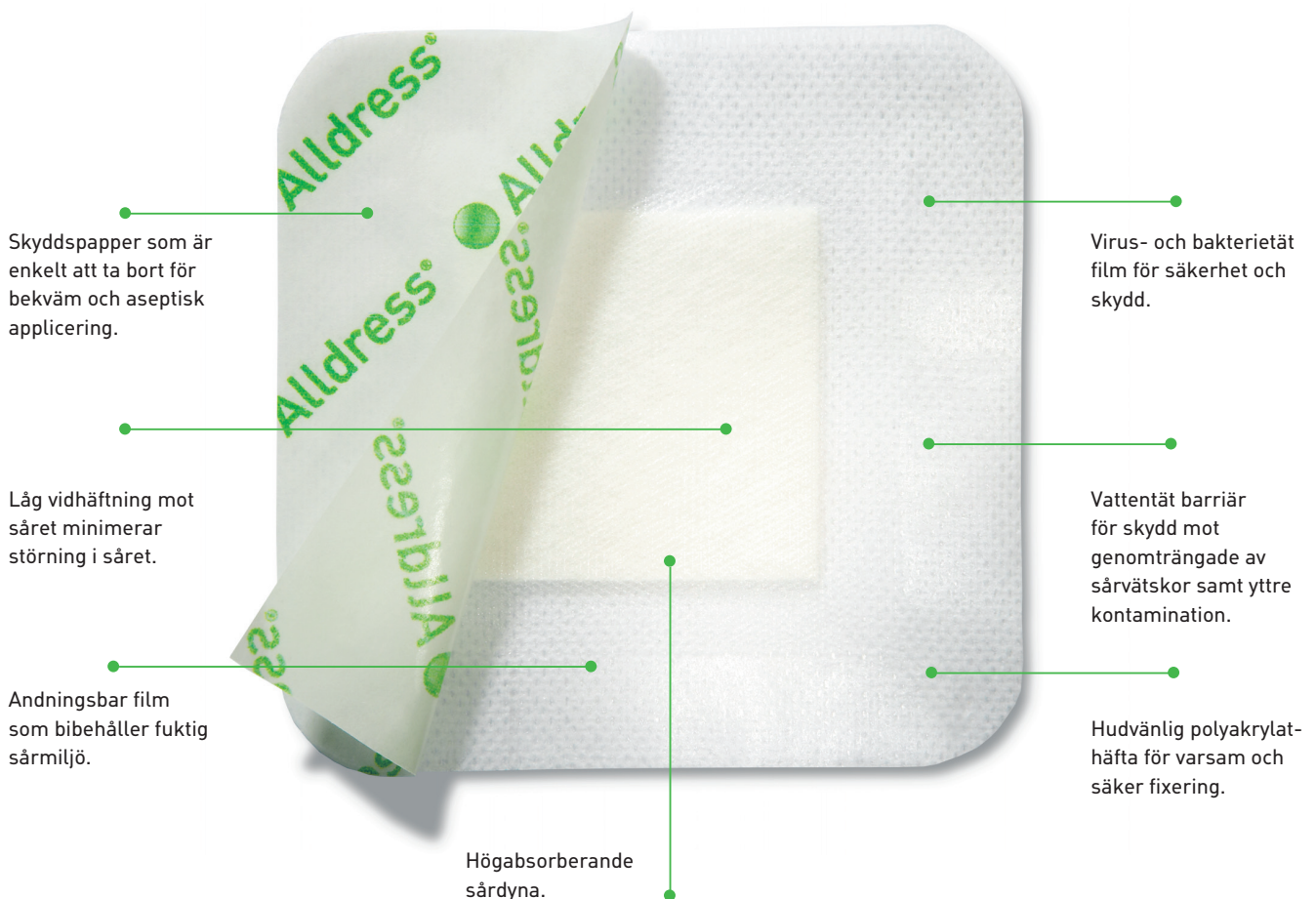

Så här fungerar Alldress

Alldress har ett lågt vidhäftande nät. Den absorberande sårdynan absorberar sårsekret och minskar risken för maceration på omkringliggande hud. Den varsamma vidhäftningen håller förbandet säkert på plats.

Den andningsbara filmen bibehåller fuktig sår-läkningsmiljö och är virus- och bakterietät, samtidigt som den hindrar vätska från att tränga igenom förbandet.

Den jämna ytan minskar friktionen mot sängkläder och kläder.

Användningsområden


Alldress kan användas för olika svagt till måttligt vätskande sår, såsom:

- Primärt förband för öppna och slutna sår, t ex sår hos diabetiker, venösa sår och trycksår, kirurgiska sår, slitsår och ytliga brännskador
- Ytterförband för öppna sår tillsammans med:
 - gel (t ex Hypergel® och Normlgel®),
 - upprensande förband (t ex Mesalt®)
 - alginat (t ex Melgisorb®)


Så här används Alldress



Öppna förpackningen och ta ut förbandet.

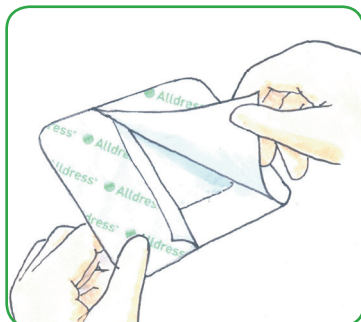

Tag bort det ena skyddspapperet.

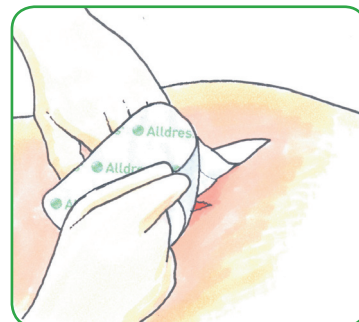

Fäst förbandet på huden och ta försiktigt bort det andra skyddspapperet. Släta ut den självhäftande kanten för optimal vidhäftning. Sträck inte förbandet vid applicering.

Bytesfrekvens

Alldress kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets och hudens tillstånd eller vad som indikerats av sjukvårdspersonal. Vid avlägsnande - ta tag i kanten och dra försiktigt av förbandet i hårens växtriktning.

Fördelar med Alldress

- Lågvidhäftande nät minskar risken för att förbandet fastnar i såret
- Bibehåller fuktig sår-läkningsmiljö
- Minskar risken för maceration
- Duschbart
- Skyddar såret mot vatten och kontamination
- Virus- och bakterietät film
- Skyddspapper som är enkelt att ta bort
- Hudvänlig, vattenbaserad polyakrylathäfta
- Högabsorberande

Observera

Alldress skall inte användas på infekterade sår utan att rådgöra med sjukvårdspersonal.



Alldress levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr	Storlek cm	Sårdyna storlek cm	Avd fp	Transp fp
265320	10 x 10	5 x 5	10	100
265340	15 x 15	10 x 10	10	100
265360	15 x 20	10 x 15	10	100