


2 april 2006

3M är känt för sina innovativa teknologier som erbjuder praktiska lösningar. 1194P002 är en produkt i vår SD9000-serie och en helhetslösning för korsbandsplastiker och övrig implantat kirurgi för knän med hög användarvänlighet.

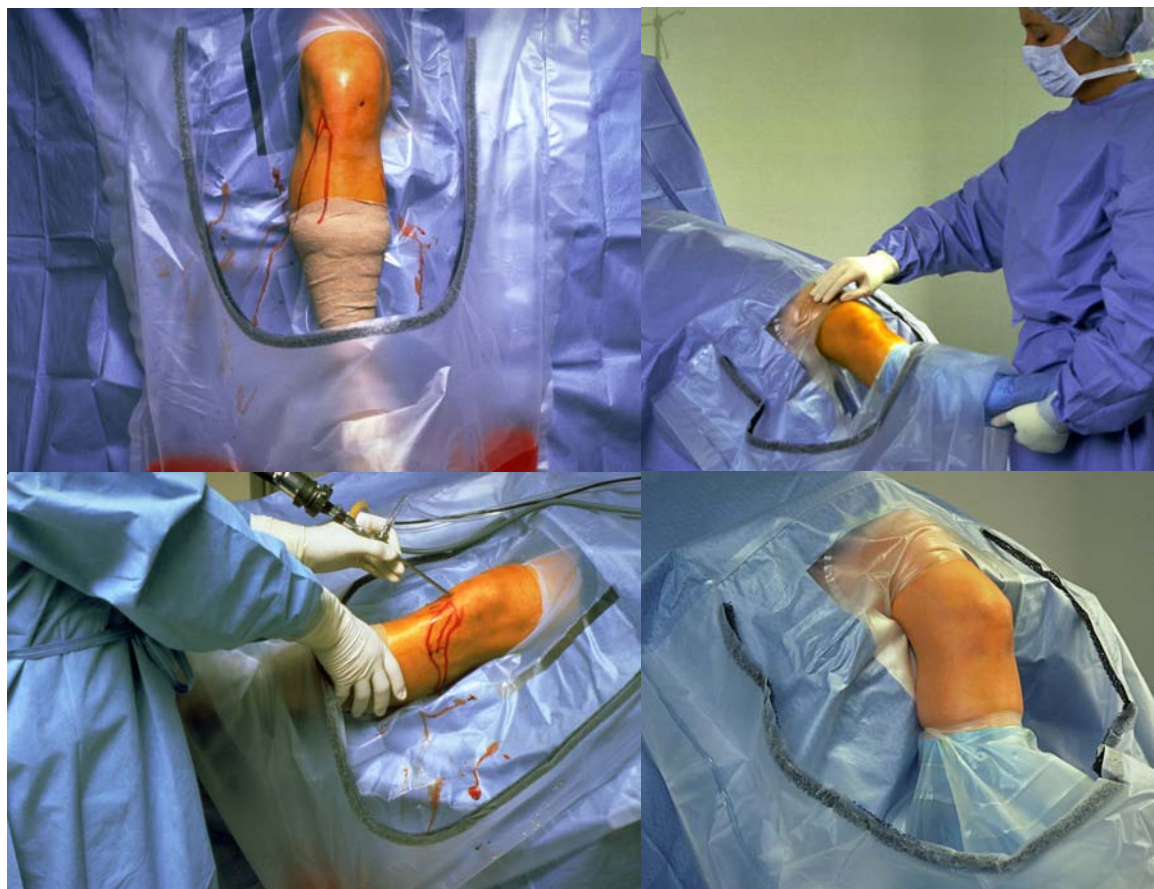

- allt-i-ett-lösning
- lågt fibersläpp från materialet, som är slitstarkt och därför tillåter kraftig manipulation, vilket är speciellt viktigt vid implantatkirurgi
- designen möjliggör lätt applicering och ger en optimal passform
- barriär, ogenomträngligt non-woven material samt uppsamlingspåse för säker kontroll av blod, kropps- och spolvätskor

Material: non woven; polypropylen

Film: polyetylen laminat (PE- film)

Produkten lyder under Medical Device Directive 93/42/EEC Klass 1 sterila produkter, Flamsäkerhet Klass 1

Steri-Drape™ Knäset 1194P002

Innehåller: 1 st 1194 artroskopilakan, 290/226 x 320 cm (290 vid anestesibågen), 1 st ass bordspåse, 80 x 145 cm, 1 st häftande lakan, 150 x 240 cm, 1 st häftande handduk, 75 x 90 cm, 1 st häftande lakan, 170 x 180 cm, 1 st instrumentbordslakan, 150 x 200 cm, 1 st op-tejp, 10 x 45 cm, 1 leveransförpackning = 5 set

Applicering av Steri-Drape™ 1194P002 Knäset

1. Lägga hälets öppning över foten. Dra foten igenom hålet på lakanet och vik ut lakanet åt sidorna.
2. Veckla sedan ut lakanet åt fotändan och sedan åt huvudändan.
3. Veckla ut påsen.
4. Klipp av toppen på utflödesporten och anslut sug om så önskas.