



## Vliwasorb® Vliwasorb® adhesive

### Superabsorberande elastisk sårkompress med spärrskikt

Mjukt, **elastiskt** och flexibelt superabsorberande sårförband med superabsorbenten (sodium polyacrylat) inpackad i cellulosa. Förbandet binder höga volymer vätska inklusive bakterier vid behandling av kraftigt vätskande sår och minskar därmed risken för maceration.

Vliwasorb erbjuder glesare förbandsbyten. Används som superabsorberande kompress att lägga som primär- och sekundärförband för kraftigt vätskande sår i kombination med t ex alginatförband Suprasorb A, Suprasorb A+Ag och Vliwaktiv Ag. Förbandet har ett spärrskikt för att förhindra läckage mot kläder och sänglinne. Ska inte klippas! Lägg förbandet om lott med 2-3cm. Förbandet är lätt att applicera och fixera med t ex fixeringshäfte Curafix H eller fixerbinda Mollelast. Lägg inte ner i sårhål, då förbandet kan expandera!

Används för behandling av kraftigt till måttligt vätskande sår t ex trycksår, arteriella sår, venösa bensår, diabetiska sår, vid postoperativ läkning, laparatomisår, fistlar mm. Mängden sårexsudat och eventuellt primärbandage styr bytesfrekvensen. Kan användas vid kompressionsbehandling.

Vliwasorb adhesive har en hudvänlig elastisk häftkant, med mycket god vidhäftning. Ingen extra fixering krävs. Speciellt lämpad för områden, där det normalt är svårt att fästa ett förband.

#### Innehåll:

- Ytskikt av icke vidhäftande, perforerad och elastisk polyetylen.
- Absorberande mellanskikt av superabsorbentpolymer (sodium polyacrylat) inpackad i cellulosa.
- Blått spärrskikt av nonwoven i polypropylen.

#### Vliwasorb®

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
7,5x7,5cm S	34 500	10	360
10x10cm S	24 501	10	360
10x20cm S	24 502	10	340
20x20cm S	24 503	10	300
20x30cm S	26 904	10	180

Önskas storlek 20x40cm – lägg 2x(10x20cm) omlott.

#### Vliwasorb® adhesive

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
12x12cm S	30 991	10	360
15x15cm S	30 992	10	360
15x25cm S	30 993	10	110