



Lakansskydd Loke – med handtag

Lakansskyddet Loke har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Det har handtag för att underlätta vändning. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck i produkten. Ytskiktet är i borstad polyester som gör att ytan känns torr även om den utsätts för väta.

Bruksanvisning

Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan. Placera lakansskyddet i sängen med gröna sidan mot madrassen. Då lakansskyddet används som draglakan, ta ett stadigt grepp om handtagen. Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens brädd.



Benämning	Absorba Lakansskydd Loke
Varumärke	Absorba
Sanicare art nr	10401
Totalyta inkl liggytan, cm	85x180
Absskap SS 8760033:2015, ml	4 965
Material liggyta	100% Borstad polyester
Material undersida	100% Polyester
Spärrskikt	Polyuretan
Absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Antal produkter/förpackning, st	3
Tvättråd	<p>Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten.</p>
Antal tvättar (hushållstvätt – ej industritvätt)	Ca 450
Kassering	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen vid förflyttning, vid varje förflyttning/positionering görs en riskbedömning om säkerhetsåtgärder måste vidtas! **Observera!** Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.



sanicare