



## Lakansskydd Assista – liggyta av frotté

Lakansskyddet Assista har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Ytskiktet består av en dubbelsidig polyesterfrotté som är mjuk och skön att ligga på. Lakansskyddet har bäddflikar för att fixera skyddet runt madrassen.



### Bruksanvisning

Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan. Placera lakansskyddet i sängen med blåa sidan mot madrassen. Då lakansskyddet används som draglakan, ta ett stadigt grepp i den laminerade delen. Observera att produkten inte är avsedd att lyfta personer med.



Sanicare art nr	1110
Antal produkter/förpackning, st	3
Vikt per produkt, g	575
Totalyta, cm	75x185
Liggytan, cm	75x85
Material liggyta	Polyester/Bomull
Material undersida	Polyester
Spärrskikt	Polyuretan
Bäddflikar	Polyester, bomull
Absorptionsskikt	Rayon, polyester
<b>Tvättråd</b> 	90°C (ej blekmedel, sköljmedel eller kemtvätt), kan torktumlas på låg värme. Klarar c:a 250 tvättar (hushållstvätt). Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage **skall produkten kasseras**. Produkten inte är avsedd att lyfta personer med.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.