

TENA®

Produktfaktablad TENA Lady Super (ej andningsbar)

Användningsområde

TENA Lady Super är läckagesäkra, bekväma och diskreta skydd för medelstora urinläckage.



TENA. HÅLLBAR INDIVIDUELL INKONTINENSVÅRD.

www.tena.nu

Produktfaktablad TENA Lady Super (ej andningsbar)

Produktegenskaper

TENA Lady Super har dubbla kärnor som absorberar urinen snabbt, sprider och lagrar den i botten av skyddet. Det gör att ytan känns torr och risken för läckage minskar.

TENA Lady Super har läckagebarriärer i form av mjuk långsgående trådelastik som skålformar produkten. Det bidrar till god komfort och passform, ökar läckagesäkerheten samt förhindrar sidoläckage. Ett mjukt yskikt närmast huden (Silky Softness) som är klätt med textilliknande nonwoven ger god komfort och hudhälsa. Odour Control™ hjälper till att förhindra oönskad lukt.

Skyddet fixeras enkelt i åtsittande trosa och sitter säkert på plats, utan att lämna häftrester på textilier, med en bred långsgående tejprensa på produktens baksida. Skyddspappret är märkt med storlek.

TENA Lady								
Uppsugningsnivå/ storlek	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/ påse st	Antal/ kart st	Praktisk absorp- tion	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Super	43	20,1	43	30	180	307	922	76 17 30



Snabbt absorberande kärna
för en torr yta



Odour Control™ hjälper till att
förhindra oönskad lukt

Användarinstruktion

Dra bort skyddspappret från baksidan av skyddet.

Fäst skyddet i åtsittande trosa eller fixeringsbyxa. Se till att skyddet behåller sin skålform.

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.

Produktfaktablad TENA Lady Super (ej andningsbar)

1059-0723

Ingående material

YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

ELASTIK

Material: Polyuretan, polyisopren (Super)

Funktion: Komfort, läckagesäkerhet och skålform

SPÄRRSKIKT

Material: Polyetenfilm (PE)

Funktion: Hindra genomvätning

För samtliga TENA Lady skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 www.tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



TENA
an Essity brand