

NycoCard[®] CRP Single Test



1

Tillsätt 5 µL patientprov eller C/Kontroll till ett provrör med R1/Spädningslösning (15-25 °C). Skaka kraftigt i 10 sekunder.

Viktigt!
Undvik luftbubbla i kapillär-röret och överflödigt prov på kapillärrörets utsida.



2

Pipettera 50 µL spätt patientprov eller spädd C/Kontroll till den förmärkta testbrickan. Låt provet suga ner i membranet (ca 30 sekunder).

Viktigt!
Undvik luftbubblor vid pipetteringen. Undvik att beröra membranet i testbrickan med pipettspetsen.



3

Tillsätt en droppe R2/Konjugat i testbrickan. Låt konjugatet suga ner i membranet (ca 30 sekunder).

Viktigt!
Droppflaskan ska hållas lodrätt ca 1 cm över membranet.



4

Tillsätt en droppe R3/Tvättlösning i testbrickan. Låt tvättlösningen suga ner i membranet (ca 20 sekunder)

Viktigt!
Droppflaskan ska hållas lodrätt ca 1 cm över membranet.



5

Avläs resultatet inom 5 minuter med NycoCard[®] READER II. Följ instruktionerna i instrumentmanualen.

Viktigt!
Välj "CRP Whole Blood" menyn för avläsning av helblodsprov, och "CRP Serum/Plasma" menyn för avläsning av C/Kontrollen och av serum och plasmaprov.