

Kvalitetssäkra urinanalyser!

Chek-Stix® Combo

Positiv och negativ kontroll för test av urinstickor från Siemens Medical Solutions Diagnostics. **Positiv Chek-Stix** ger ett positivt eller förhöjt resultat. **Negativ Chek-Stix** ger ett negativt eller normalt resultat vid avläsning.



Test	Positiv Chek-Stix		Negativ Chek-Stix
	Nordiska enheter	SI-enheter	
U-glukos	1+ – 2+	5,5 – 14 mmol/l	Negativ
U-acetoacetat	Positiv	Positiv	Negativ
U-densitet	1,000 – 1,015	1,000 – 1,015	1,010 – 1,020
U-blod	2+ – 3+	80 – 200 Ery/ μ L	Negativ
U-pH	≥ 8	≥ 8	6,0 – 7,0
U-protein	Spår (\pm) – 2+	Spår – 1,0 g/L	Negativ
U-nitrit	Positiv	Positiv	Negativ
U-leukocyter	1+ – 3+	15 -125 Leuko/ μ L	Negativ

BRUKSANVISNING

1. Fyll ett provrör med 12 ml destillerat vatten. (Ej kranvatten!).
2. Ta upp en Chek-Stix ur burken. (Positiv eller Negativ).
3. Lägg stickan i provröret. Sätt på korken.
4. Vänd provröret fram och tillbaka under 2 minuter.
5. Låt sedan provröret stå i 30 minuter i rumstemperatur.
6. Vänd provröret ytterligare en gång. Avlägsna sedan stickan.
7. Den syntetiska urinen är hållbar i 8 timmar och skall förvaras i rumstemperatur.

Chek-Stix® Combo

www.siemens.com/diagnostics

SIEMENS
medical