



Cellona® Shoe kan bäras stängd sko eller som en sandal.
Passar både höger och vänster fot.



Fastsydda kardborrspännen ger en säker och perfekt passform.

Cellona® Shoe

Två skor i en

Som sandal eller sko

Cellona® Shoe är en förbandsskyddande sko, som kan bäras antingen som sandal eller som sko. Då skon bärs som en traditionell sko, erbjuder den ett pålitligt skydd för hela foten och det förband som omger denna. Fotens ovandel täcks av en mjuk, vadderad flärp som skyddar fot och tår från yttre påverkan.

Om flärpen placeras under foten (på insulan) så förvandlas Cellona® Shoe från en traditionell sko till en öppen sandal och luftcirkulation kring foten förbättras.

Passar både på höger och vänster fot

Cellona® Shoe kan bäras både på höger och vänster fot. De justerbara kardborrspänna medför att skon går bra att bära tillsammans med alla förband - sårförband, gips och syntetgipsförband samt flebologiska/lymfologiska förband.

Stadig

Cellona® Shoe förser den bandagerade foten med ett säkert grepp vid rörelse - oavsett om den bärs som sko eller som sandal.

De fastsydda kardborrspänna medför att skon kan anpassas efter fotens utformning. Spännet över ankeln och det stabila greppet om hälen gör att skon sitter kvar som den ska även vid häftiga rörelser. De slitstarka kardborrspänna är ordentligt fastsydda och alla kanter är förstärkta med extra sömmar.

Lätt och bekväm

Cellona® Shoe är bekväm att bära. Vikten är låg. Det flexibla materialet (huvudsakligen polyester) som skon är tillverkad av, gör den anpassningsbar och lätt att bära. Skon är lätt att ta på och av. Lika fort går det att göra om den från en traditionell sko till en sandal. Skon har ett robust och tilltalande utseende.

Möjlighet att gå vid tidigt stadium

Cellona® Shoe ger patienten en möjlighet att gå vid ett tidigt stadium och ger ett effektivt skydd mot yttre påverkan.

Indikationer:

- Immobiliserande fotförband såsom gips/syntetgips, zinkförband (sk Unna's Boot)
- Pre- och postoperativa fotförband
- Posttraumatiska fotförband
- Stöd för omfattande (eventuellt vadderade) sårförband
- Flebologiska-/lymfologiska förband
- **När patienten inte kommer i sin vanliga sko**



Stötabsorberande sula med ett halkskyddande mönster.

Stötabsorberande sula med halkskydd

Yttersulan har försetts med ett halkskyddande mönster som garanterar en problemfri gång även på våta underlag, samtidigt som utformningen möjliggör korrekta gångcykler.

Material:

Ovandel – polyester, polyurethane, polypropylene, polyamide, cotton.

Sula - papp/polymer, ethylene vinyl acetate copolymer, thermoplastic rubber, polyester

Tvätt:

Cellona® Shoe är vatten- och smutsavvisande. Skon kan tvättas i 30°C.

Förpackning:

Skorna ligger styckvis förpackade

Storlekar:

Storlekarna motsvaras av skostorlek enligt följande:

| Storlek | Lev.artnr | Avdfp | Trpfp |
|------------------|-----------|-------|-------|
| För barn | | | |
| P 25-30 | 16 471 | 1 | 12 |
| XS 31-34 | 16 472 | 1 | 12 |
| För vuxna | | | |
| S 35-38 | 16 473 | 1 | 12 |
| M 39-41 | 16 474 | 1 | 12 |
| L 42-43 | 16 475 | 1 | 12 |
| XL 44-47 | 16 476 | 1 | 12 |