




Kombiglid med handtag och bäddflikar - Lakansskydd med glidyta

Kombiglid har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kombiglid har en undersida av lågfriktionsmaterial och handtag som underlättar vändning. Ytskiktet är i borstad polyester om gör att ytan känns torr även efter läckage. Lakansskyddet har bäddflikar, för fixering i bädden. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.



Bruksanvisning Placera lakansskyddet i sängen med glidytan mot madrassen. Fixera skyddet med hjälp av vingarna runt madrassen. Då lakansskyddet används som draglakan, ta ett stadigt grepp om handtagen. Observera att produkten inte är avsedd att lyfta personer med. Var noga med att glidlakanet är anpassat efter sängens bredd.

Benämning	Absorba Kombiglid med handtag och bäddflikar
Varumärke	Absorba
Sanicare art nr	12421
Antal produkter/förpackning, st	1
Vikt per produkt, g	1200
Absskap SS 8760033:2015	2476 ml
Totalyta, LxB, cm	90x230
Liggytan, LxB, cm	90x110
Handtag	Kraftig nylon
Bäddflikar vikt, g/m²	200
Material liggyta	100% Borstad Polyester
Material undersida, glidytan	100% Polyester
Bäddflikar	65 % polyester, 35 % bomull
Spärrskikt	Polyuretan
Absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon
Tvättråd	 Vid avförings- eller blodfläckar bör kombiglidet snarast sköljas i kallt vatten.
Antal tvättar (hushållstvätt – ej industritvätt)	Ca 200
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Bädda alltid in bäddflikarna. Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme



sanicare