

Produktfaktablad TENA Discreet Maxi Night

Användningsområde

TENA Discreet Maxi Night är ett läckagesäkert, bekvämt och diskret skydd för medelstora urinläckage. Skyddet är bredare baktill för hög läckagesäkerhet vid liggande ställning.



Produktegenskaper

TENA Discreet Maxi Night har en unik form. Skyddet är bredare baktill för att ge extra skydd, uppsugningsförmåga och säkerhet när man ligger ner. Urinen absorberas snabbt i dubbla kärnor, sprids och lagras i botten av produkten, vilket gör att ytan känns torr och risken för läckage minskar. Mjuk sidoelastik skålformar skyddet och bidrar till god passform och ökad läckagesäkerhet.

TENA Discreet Maxi Night har ett silkeslent ytskikt närmast huden och ett andningsbart spärrskikt som är klätt med textilliknande nonwoven för ökad komfort och god hudmiljö. TENA Discreet har Fresh Odour Control. Unika micro-fresh pärlor reducerar tillväxten av ammoniak producerande bakterier, vilket i sin tur reducerar lukt.

Skyddet fixeras enkelt i åtsittande trosa och sitter säkert på plats, utan att lämna häftrester på textilier, med en bred längsgående tejprensa på produktens baksida. Skyddspappret är märkt med storlek och bild som visar vilken del som är bak på skyddet, vilket underlättar korrekt fixering. Produkterna är diskret enstycksförpackade.



Produktfaktablad TENA Discreet Maxi Night

TENA Discreet

Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Längd cm	Bredd baktill cm	Vikt g	Antal/ påse st	Antal/kart st	Antal.kart halvpall	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Maxi Night	✓	39,4	18,2	34,3	6	48	44	331 ml	992 ml	76 09 13



TENA Discreet ger trippelt skydd från läckage, lukt och fukt.



Skydd utformat för liggande ställning - bredare baktill



Fresh Odour Control

- unika micro-fresh pärlor reducerar tillväxten av ammoniak producerande bakterier, vilket i sin tur reducerar lukt.

Användarinstruktion

Ta skyddet ur enstycksförpackningen och vik upp det. Dra bort skyddspappret på baksidan. Fäst skyddet, med den bredare delen bak, i åtsittande trosa eller fixeringsbyxa. Se till att skyddet behåller sin skålform. Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshantering.

Produktfaktablad TENA Discreet Maxi Night

Ingående material

YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

ELASTIK

Material: Polyuretan

Funktion: Komfort, läckagesäkerhet och skålform

SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm (PE)

Funktion: Hindra genomvätning

För samtliga TENA Discreet skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 www.tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige