


## Minimerar läckage och maceration



AQUACEL<sup>®</sup> Hydrofiber<sup>®</sup> förband är ett högabsorberande förband som används för måttligt till kraftigt vätskande sår. Hydrofibers unika sätt att binda in vätska ger kontroll över sårvätska och bakterier. Detta minimerar läckage och maceration. Gelbildningen bibehåller en fuktig sårmiljö som gynnar sårhäkningsprocessen och möjliggör skonsamma omläggningar. AQUACEL förlänger omläggningsintervallet och ger en kostnadseffektiv sårbehandling.

**GYNNSAM SÅRLÄKNINGSMILJÖ**  
Sammanhängande gel som skapar en gynnsam sårläkningmiljö.

**HYDROFIBER®-TEKNOLOGI**  
AQUACEL består av 100 % natriumcarboxymethylcellulosa och binder in sårsvätska och bakterier inne i fibrerna.

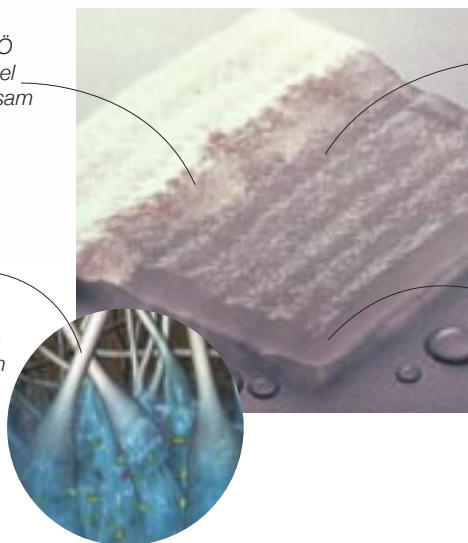

**ABSORPTION OCH RETENTION**  
Fibrerna omvandlas mycket snabbt till en sammanhängande gel.

**AQUACEL**  
Bevarar en fuktig sårmiljö och avlägsnas enkelt från såret.

## KONTROLL ÖVER SÅRSEKRET

AQUACEL® Hydrofiber® förband har en extremt god och snabb absorptionsförmåga och hanterar och kontrollerar sårsvätska på ett unikt sätt. AQUACEL är lämplig för måttligt till kraftigt vätskande sår. Risken för maceration reduceras och antal förbandsbyten minimeras.

## BEHAGLIG FÖR PATIENTEN

AQUACEL bildar en sammanhängande gel i kontakt med sårsvätska och är därför lätt att ta bort utan att orsaka obehag för patienten.

## ENKEL ATT ANVÄNDA

AQUACEL läggs direkt i såret med ett täckförband över. Till exempel kan fuktighetsbevarande förband som DuoDERM® Extra Thin förband eller Versiva® förband användas. AQUACEL appliceras med en marginal på 1 – 2 cm utöver sårkanterna. Vid kraftig sekretion kan flera lager AQUACEL appliceras. AQUACEL används torr vid vätskande sår, men kan förfuktas med fysiologisk NaCl vid torra sår. Vid illaluktande sår kan CarboFlex® förband användas som täckförband.

### AQUACEL®

| Storlek    | Förp | Bestnr | Int kod |
|------------|------|--------|---------|
| 5 x 5 cm   | 10   | 202040 | 177901  |
| 10 x 10 cm | 10   | 202041 | 177902  |
| 10 x 10 cm | 5    | 844431 | 177918  |
| 15 x 15 cm | 5    | 202042 | 177903  |

### AQUACEL® Hydrofiber® band för kaviteter

|           |   |        |        |
|-----------|---|--------|--------|
| 2 x 45 cm | 5 | 202043 | 177904 |
|-----------|---|--------|--------|

### AQUACEL® Hydrofiber® postoperativa storlekar

|           |    |        |        |
|-----------|----|--------|--------|
| 4 x 10 cm | 10 | 810733 | 403730 |
| 4 x 20 cm | 10 | 810734 | 403731 |
| 4 x 30 cm | 10 | 810735 | 403732 |



## FAKTA

### AQUACEL® HYDROFIBER® FÖRBAND

AQUACEL består av 100 % cellulosa (natriumcarboxymethylcellulosa). Materialet hanterar sårsvätska på ett unikt sätt. Vätskan och eventuella bakterier binds snabbt och effektivt in i fibrerna. Detta ger längre bytesintervaller och en bra sårläkningmiljö.

### INDIKATIONER

AQUACEL används för måttligt till kraftigt vätskande sår eller sår som förväntas att blöda. Exempel på indikationer är kroniska sår som t ex bensår, trycksår och diabetessår, akuta sår som t ex postoperativa sår, tagställen och delhudsbrännskador. Vid behandling av infekterade sår rekommenderas AQUACEL® Ag med 1,2 % joniserad silver.

### BYTESINTERVALL

Max sju dagar eller när förbandet är mättat.

### FÖRVARING

Förvaring sker i rumstemperatur

### STERILISERINGSMETOD

Gammasteriliserad.

### KLASSIFICERING

AQUACEL är CE-märkt och tillfredsställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

### HÅLLBARHET

5 år.

För ytterligare information se bruksanvisning i förpackningen.

 **ConvaTec**  
A Bristol-Myers Squibb Company

ConvaTec, Box 15200, 167 15 Bromma.  
Kundservice: 020-21 22 22.  
Fax: 08-704 89 98.  
www.convatec.com  
convatec.kundservice@bms.com