


Silikonvidhäftning:

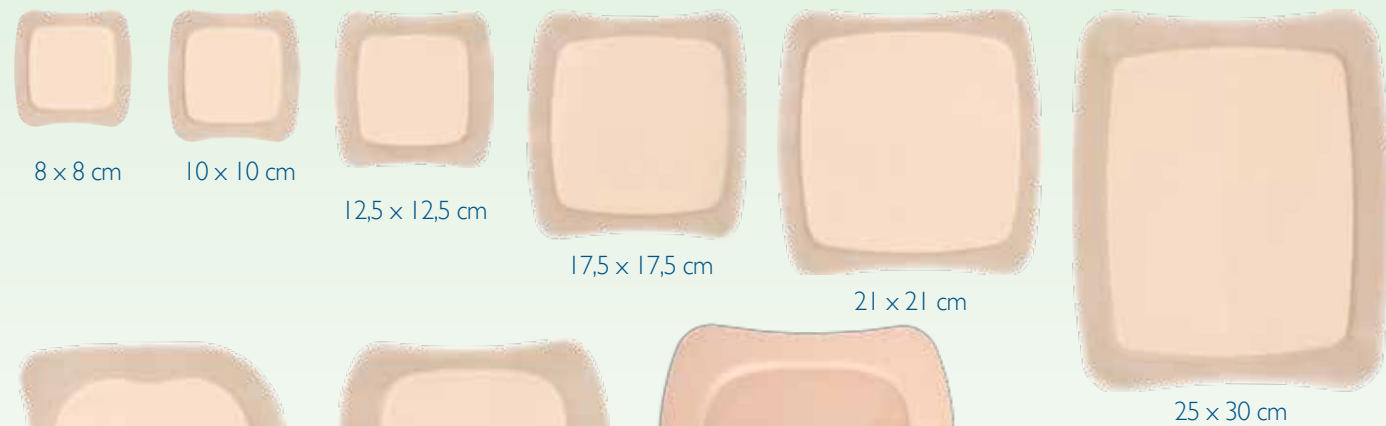

Rektangulära vidhäftande förband
8 x 13 cm, 10 x 20 cm, 10 x 25 cm, 10 x 30 cm

| Varunummer | Storlek cm | Max sårstorlek cm | Antal/Fp |
|-----------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 420804 | 8 x 8 | 3 x 3 | 10 |
| 420680 | 10 x 10 | 5 x 5 | 10 |
| 420619 | 12,5 x 12,5 | 6,5 x 6,5 | 10 |
| 420621 | 17,5 x 17,5 | 11,5 x 11,5 | 10 |
| 420623 | 21 x 21 | 15 x 15 | 5 |
| 420624 | 25 x 30 | 19 x 24 | 5 |
| Hälförband | | | |
| 420625 | 19,8 x 14 | 12 x 7 | 5 |
| Sakrumförband | | | |
| 420626 | 20 x 16,9 | 11,5 x 9,5 | 5 |
| 420828 | 24 x 21,5 | 16 x 14 | 5 |
| Rektangulära förband | | | |
| 421149 | 8 x 13 | 3 x 7 | 10 |
| 421151 | 10 x 20 | 4 x 13 | 10 |
| 421153 | 10 x 25 | 4 x 18 | 10 |
| 421155 | 10 x 30 | 4 x 23 | 10 |


Allt du uppskattar med ett skumförband *och mer*



Endast ett förband kan erbjuda skumförbandens komfort och enkelhet samt AQUACEL® förbandets sår-läkande egenskaper.



Icke vidhäftande:

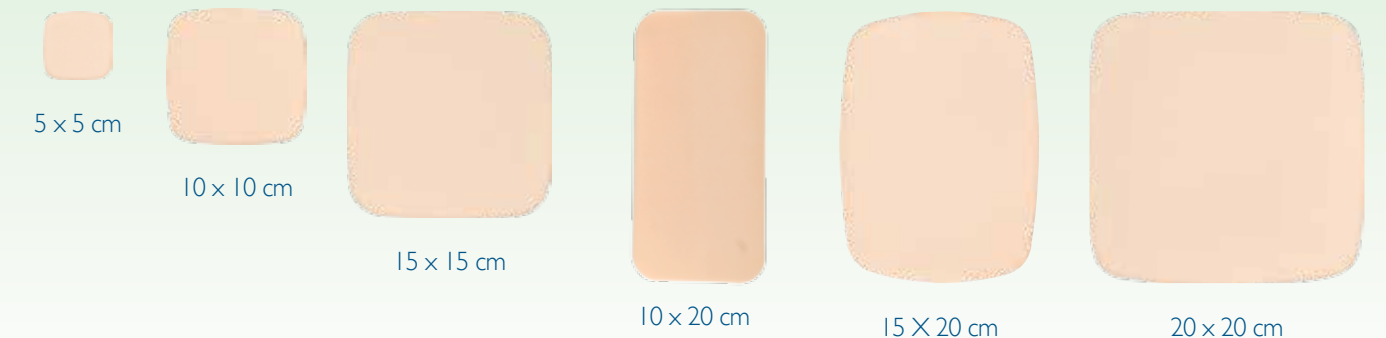

| Varunummer | Storlek cm | Antal/Fp |
|------------|------------|----------|
| 420631 | 5 x 5 | 10 |
| 420633 | 10 x 10 | 10 |
| 420635 | 15 x 15 | 5 |
| 413623 | 10 x 20 | 10 |
| 420637 | 15 x 20 | 5 |
| 420636 | 20 x 20 | 5 |



®/™ är varumärken tillhörande ConvaTec Inc.

Applisering:

AQUACEL® Foam förband kan användas både som primärförband och täckförband.

Val av förband – välj storlek och form på förbandet så att absorptionskompressens yta är minst 1 cm större än sårytan. Förbandet kan klippas till i önskad form för bästa passform. Annan form av fixation (tejp, linda) bör användas när det vidhäftande förbandet klippts till eller för att hålla icke vidhäftande förband på plats.

Ta ut förbandet ur den sterila förpackningen och undvik kontakt med sårkontaktsslagret och den vidhäftande ytan. Avlägsna skyddspappret vid användning av vidhäftande förband.

Applisera förbandet centrerat över såret. Vid applisering av vidhäftande förband, följ den häftande kanten med fingrarna för att säkerställa vidhäftningen.

En lämplig fixering (tejp, linda) bör användas för att hålla förbandet på plats vid användande av icke vidhäftande förband eller där vidhäftande förband klippts till i önskad form eller storlek.



Avlägsnande:

Förbandet bör bytas när det är kliniskt indikerat (läckage, blödning, tilltagande smärta eller misstanke om infektion). AQUACEL® Foam förband kan sitta i upp till 7 dagar.

Såret rengöres med lämpliga intervaller och enligt lokala rutiner.

Vid avlägsnande av förbandet, tryck försiktigt ner huden vid ett av hörn på förbandet och lossa hörnet. Upprepa momentet tills alla hörn är lossade. Lyft försiktigt bort förbandet.



Applisering på svårbandagerade områden:

AQUACEL® Foam förband finns tillgängligt i sakrum- och hälform.

Sakrumförband:



1. Avlägsna skyddspappret från den vidhäftande ytan.
2. Håll förbandet i dess sidokanter och vik det på mitten med ytterlagret mot varandra. Applisera den vikta delen i sakrums medellinje.
3. Vik ut sidorna och följ den vidhäftande kanten med fingrarna för att säkerställa vidhäftningen.

Hälförband:



1. Avlägsna skyddspappret från den vidhäftande ytan.
2. Applisera den övre delen av förbandet på hälsens baksida och fäst med häftkanten.
3. Vik upp förbandet under foten och fäst med resten av häftkanten. Kontrollera att kanten runt hela förbandet är fixerad.

Hälförband på små fötter:



1. Välj en lagom storlek av ett fyrkantigt, vidhäftande förband. Avlägsna inte skyddspappret. Klipp två diagonala klipp i förbandet som bör vara ca 3 cm.
2. Ta bort skyddspappret från den vidhäftande ytan. Applisera den övre delen av förbandet på hälsens baksida och fäst med häftkanten.
3. Vik upp förbandet under foten och fäst med resten av häftkanten. Kontrollera att kanten runt hela förbandet är fixerad. Eventuellt kan ytterligare fixation med tejp behövas.

Förslag på bandagering av armbåge, fingrar och tår



Kan klippas i önskad storlek och form för bästa passform.

En lämplig fixering (tejp, linda) bör användas för att hålla förbandet på plats.

* Se bruksanvisning i förpackningen för ytterligare information