

BD AutoShield™ Duo Pennkanyl med dubbel automatiserad skyddshylsa




- Den första säkerhetspennkanylen som är stickskyddad i BÅDA kanyländarna. Båda skydden låses automatiskt efter injektionen för att förhindra oavsiktliga stickskador från någon av nålens ändar.



- 5mm säkerhetspennkanyler minskar risken för intramuskulära injektioner
- Kan användas av alla personer med diabetes
- Kanylen är dold för en mindre hotfull upplevelse
- Kompatibel med samtliga pennor som används vid diabetesbehandling



Beskrivning	Kanylstorlek ytterdiam x längd	Avdelning/ Transport förp.	Artikelnr. BD
BD AutoShield™ Duo Pennkanyl	30 G x 0,30 mm 0,30 mm x 5mm	100/800	329605
BD AutoShield™ Duo Pennkanyl	30 G x 0,30 mm 0,30 mm x 8mm	100/800	329608

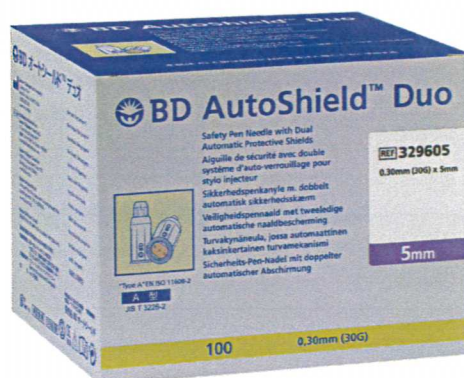

Materialinnehåll
Hylsa: Polypropylen
Skydd: Polypropylen + färgämne
Fjäder: Rostfritt stål
Lock: Polyeten
Fäste: Polypropylen + bläck
Clips: Rostfritt stål
Kanyl: Rostfritt stål
Kanyl ytbehandling: Silikon
Kanyl lim: Ultraviolet Cure Adhesive
Etikett: 35-40 # vit litho

Förpackningsmaterial
Kartong
Well-papp

CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)

Steriliseringsmetod:
Strålning (Gamma)

5 år

Latexfri



BD Medical - Diabetes Care
Arstaängsvägen 25
Box 47204
100 74 Stockholm
Tel: 08-775 51 00
Fax: 08-645 08 08
www.bd.com/se/diabetes

Säkrare hantering med BD AutoShield™ Duo

Den första säkerhetspennkanylen som är stickskyddad i BÅDA kanyländarna
5mm & 8mm



Automatic
Dual
Protection

1 Förbered injektionen

1 Sätt fast pennkanylen



2 Kontrollera flödet, tryck ut eventuell luft




3 Fatta pennan i handen och håll tummen upprätt



2 Injektionsteknik

Utan lyft hudveck rekommenderas för 5mm*

Inget hudveck och injektion i 90° vinkel

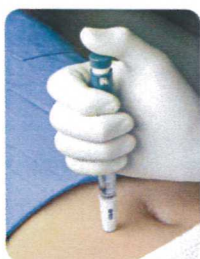

Inkorrekt vinkel

* Lyft ett hudveck om det finns risk för intramuskulär injektion.

Lyft hudveck rekommenderas för 8mm*

Brett hudveck och injektion i 90° vinkel



Hudvecket är inte tillräckligt brett
Inkorrekt vinkel

* Om det inte finns någon risk för intramuskulär injektion är det inte nödvändigt att lyfta ett hudveck.

Nålen har penetrerat huden helt när det vita skyddet är i kontakt med huden.
Låt kanylen vara kvar i huden i 10 sekunder efter att kolvstången är helt nedtryckt.

3 Automatiskt, dubbelt skydd

När kanylen lyfts bort från huden låses skyddet och ett rött indikeringsband bekräftar att säkerhetsfunktionen har aktiverats.



Säkerheten på pennkanylens bakre sida är bekräftad när det orange skyddet automatiskt vecklats ut och täcker nålen när den tagits av från pennan.



4 Säkrare avfallshantering av nålar

Nålen är skyddad i båda ändar



Kassera den använda pennkanylen i en behållare för vassa föremål.



Precis som alla BD Micro-Fine™+ pennkanyler passar den nya BD AutoShield™ Duo till alla injektionspennor för diabetes-behandling.**



BD Medical - Diabetes Care
Årstaängsvägen 25,
Box 47204,
100 74 Stockholm
Tel: 08-775 51 00
Fax: 08-645 08 08
Email: DiabetesCare_swe@europe.bd.com
www.bd.com/se/diabetes

**Alla påståenden är korrekta vid tidpunkten för tryck, oktober 2011.
Alla påståenden hänför sig endast till diabetesläkemedel och hjälpmedel som för närvarande finns i Sverige.

BD, BD Logo, BD Micro-Fine och BD AutoShield är varumärken som tillhör Becton Dickinson and Company. ©2011 BD.
Corporate identity number: 556145-6756 Seat: Stockholm.