




Förbandet som signalerar byte

DuoDERM[®] Signal

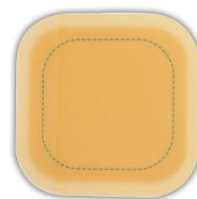

DuoDERM[®]-plattor är en serie sårförband som används till oklusiv fuktighetsbevarande sårbehandling. I kontakt med sårvätska bildas en fuktig gel som bibehåller en fuktig sårmiljö och gynnar sårhäkningen. DuoDERM[®]-plattor har det mesta gemensamt. De består av en vidhäftande, hydrokolloid massa som bl a innehåller gelatin, pektin och natriumcarboxymethylcellulosa. På ovansidan finns en polyuretan film/foam. DuoDERM[®]-plattan har en diskret färg. Kan användas vid bad och dusch. De flesta plattorna kan klippas till lämplig storlek och form. Värm gärna plattan med händerna innan den appliceras på såret. Applicera sedan DuoDERM[®] med en marginal på 3 cm utöver sårkanterna, för DuoDERM[®] Mini gäller 1 cm. Se till att huden är torr så att plattan fäster bra. Förbandet kan sitta upp till 7 dagar eller så byts det när förbandet är mättat.



DuoDERM® Signal förband

DuoDERM® Signal är ett smidigt förband som passar speciellt bra för lätt till måttligt vätskande sår.

DuoDERM®-materialet skapar en fuktig som understödjer kroppens sår-läkningsprocess och hjälper till att skydda huden runt såret. DuoDERM® fungerar som en bakterie- och virusbarriär¹ när förbandet är intakt och inget läckage förekommer.



Storlek	Förp.	Vnr
10 x 10 cm	5 st	205455 / 403326
14 x 14 cm	5 st	205456 / 403327
20 x 20 cm	5 st	205457 / 403328
18,5 x 19,5 cm (häl)	5 st	205458 / 410500
20 x 22,5 cm (sacrum)	5 st	205459 / 410501

Fakta

DuoDERM® Signal förband

DuoDERM® Signal förband är ett modernt, vidhäftande hydrokolloid förband med avfasad kant och en innovativ visuell bytesindikator. Indikatorn (en streckad grön markering på yttre delen av förbandet) är till hjälp för att se när förbandet är mättat och det är dags att bytas ut. Förbandets avfasade kant och ovansida med lågfriktionsfilm minskar risken för veckning och gör att förbandet kan användas på svårbandagerade områden.

Vid kontakt med sårsvätska bildar den unika hydrokolloida formulan (pektin, gelatin, natriumkarboxymetylcellulosa och vidhäftande polymerer) en sammanhängande gel som bibehåller en fuktig sår-läkningsmiljö, främjar autolytisk debridering och stimulerar bildning av granulationsvävnad.

Förvaring/hållbarhet

Förvaras torrt i rumstemperatur. Hållbarhet 5 år.

Sterilisering/metod

Gammasteriliserad.

Klassificering

DuoDERM® Signal är CE- märkt och tillfredställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

För ytterligare information se bruksanvisning i respektive förpackning.



Kundservice: 020-21 22 22

1. Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds 1993;5:1-8.