


## Sätt fart på läkningen!

- För en naturlig kickstart

**Suprasorb® C** är förbandet av 100% naturligt kollagen som har förmågan att sätta fart på läkningen av stagnerade sår. Kollagenet accelererar sårhälingen då det stimulerar bland annat hemostasen. Förbandet är helt resorberbart!

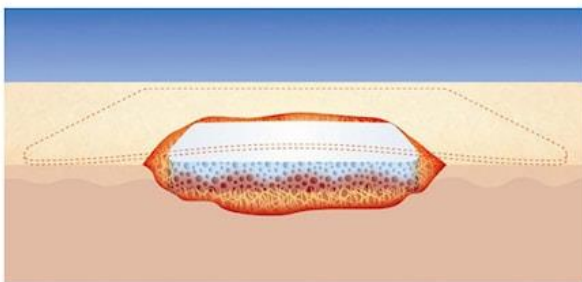

## Rensar upp och absorberar

**Suprasorb® C** avlastar såret tack vare sin upprensande funktion. Produkten absorberar/binder mängder av sårsekret, nekrotisk vävnad, bakterier och enzymer och påskyndar därigenom läkningsprocessen.

### Snabbare läkning



- Accelererar sårhälingen
- Ökar syntesen av kollagen och fibroblaster

### Enkel att anpassa




- Dynan är klippbar
- Kan formas efter sårets storlek och form
- Förfuktas vid behov med koksalt

### Ett bättre resultat



- Goda kosmetiska resultat vid ärrformation

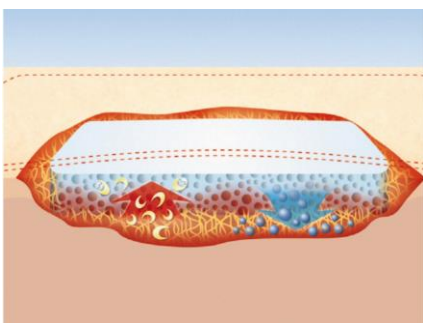

### Indikationer

- Tryckskador
- Sekunderläkande sår
- Diabetiska fotsår
- Bensår
- Infekterade och icke infekterade sår

### Funktion

Genom att absorbera läkningshämmande faktorer som proteaser (MMP's) och cytokiner, skapas ett lugnare klimat i sårbedden. Kollagen frigörs även från förbandet för att stödja de läkande strukturerna i såret.



### Användaranvisning

1. Rengör såret ordentligt enligt ordination och lokal rutin  
Omgivande hud ska vara ren och torr
2. Applicera förbandet torrt direkt i sårhålan (kan fuktas lätt med koksalt vid torra sår)
3. Klipp förbandet vid behov med en steril sax för att passa sårets form och storlek. Förbandet bör ej läggas utanför såret där det inte har någon effekt
4. Den tätaste strukturen, dvs den sida som ligger nedåt i förpackningen, läggs mot sårets yta
5. Tryck lätt på förbandet för att säkerställa kontakt med sårets yta

### Vilket täckförband?

- **Lätt vätskande sår**  
*Sträva efter en fuktig sårmiljö!*  
-Lätt absorberande förband, ex. *Solvaline N*  
-Sårfilm, ex. *Suprasorb F*  
-Hydrokolloid, ex. *Suprasorb H*  
-Tunt polyuretanskum, ex *Suprasorb P Sensitive Lite*
- **Måttligt vätskande sår**  
*Bevara en fuktig sårmiljö!*  
-Hydrokolloid, ex. *Suprasorb H*  
-Polyuretanskum, ex. *Suprasorb P Sensitive*

Vid **rikligt vätskande** sår kan det övervägas att använda *Vliwasorb Pro*

### Suprasorb® C finns i tre storlekar

Storlek	Lev.art.nr.	Avd.fp	Trp.fp
4x6 cm	20 481	5	225
6x8 cm	20 482	5	180
8x12 cm	20 483	5	90

### Produktmaterial

- 100% naturligt kollagen



### Suprasorb® C

- är CE-märkt enligt MDR klass III
- förvaras torrt och rent i rumstemperatur
- är hållbar i 5 år från produktionsdatum
- har en förpackning av cellulosa, polyester och aluminium
- har en avdelningsförpackning av cellulosa vilken källsorteras som pappersförpackning
- kommer i en transportkartong i wellpapp av cellulosa vilken källsorteras som pappersförpackning
- produkten hanteras som brännbart avfall