



Skonsam sårbehandling



DuoDERM® E Border

DuoDERM® Mini

DuoDERM®-plattor är en serie sårförband som används till oklusiv fuktighetsbevarande sårbehandling. I kontakt med sårvätska bildas en fuktig gel som bibehåller en fuktig sårmiljö och gynnar sårhäkningsprocessen. DuoDERM®-plattor har det mesta gemensamt. De består av en vidhäftande, hydrokolloid massa som bl a innehåller gelatin, pektin och natriumcarboxymethylcellulosa. På ovansidan finns en polyuretan film/foam. DuoDERM®-plattan har en diskret färg. Kan användas vid bad och dusch. De flesta plattorna kan klippas till lämplig storlek och form. Värm gärna plattan med händerna innan den appliceras på såret. Applicera sedan DuoDERM® med en marginal på 3 cm utöver sårkanterna, för DuoDERM® Mini gäller 1 cm. Se till att huden är torr så att plattan fäster bra. Förbandet kan sitta upp till 7 dagar eller så byts det när förbandet är mättat.



DuoDERM® E Border förband

DuoDERM® E Border är ett smidigt förband som passar speciellt bra för lätt till måttligt vätskande sår.

DuoDERM®-materialet skapar en fuktig sårhelingsmiljö som understödjer kroppens sårhelingsprocess och hjälper till att skydda huden runt såret. DuoDERM® fungerar som en bakterie- och virusbarriär¹ när förbandet är intakt och inget läckage förekommer.



Storlek	Förp.	Vnr
10 x 10 cm	5 st	281568 / 187970
14 x 14 cm	5 st	281576 / 187971
15 x 18 cm (droppform)	3 st	281600 / 187973
20 x 23 cm (droppform)	5 st	281618 / 187974

DuoDERM® Mini förband

DuoDERM® Mini är bra till behandling av små, lätt vätskande sår. Ex. skrubbsår, brännskador, små kirurgiska incisioner så som Laparoskopier och biopsier.



Storlek	Förp.	Vnr
5 x 5 cm	50 st	281451 / 37300

Fakta

DuoDERM® E Border och DuoDERM® Mini förband

DuoDERM® E Border och DuoDERM® Mini förband är sterila, självhäftande hydrokolloida förband med ett yttre skikt av polyuretanskum och en extra häftkant som säkrar god vidhäftning. Vid kontakt med sårvätska bildar den unika hydrokolloida formulan (pektin, gelatin, natriumkarboxymetylcellulosa och vidhäftande polymerer) en sammanhängande gel som bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö, främjar autolytisk debridering och stimulerar bildning av granulationsvävnad.

Förbandens avfasade kant minskar Risken för veckning och gör att förbandet kan användas på svårbandagerade områden.

Förvaring/hållbarhet

Förvaras torrt i rumstemperatur. Hållbarhet 5 år.

Steriliseringsmetod

Gammasteriliserad.

Klassificering

DuoDERM® Standard och E är CE-märkta och tillfredställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

För ytterligare information se bruksanvisning i respektive förpackning.



Kundservice: 020-21 22 22

1. Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds 1993;5:1-8.