

## Ett enklare sätt att administrera en gel

 **smith&nephew**  
**INTRASITE<sup>®</sup> CONFORMABLE**  
Hydrogel i non-wovenförband

- Formbar non-wovenväv impregnerad med IntraSite Gel
- Återfuktar nekrotisk vävnad
- Effektiv upprensning
- Skapar en tät kontakt mellan gelen och sårytan
- Bibehåller en fuktig sårmiljö



# INTRASITE CONFORMABLE – hydrogel i non-wovenförband



**IntraSite Conformable** kombinerar fördelarna från **IntraSite Gel** med ett non-woven förband. **IntraSite Conformable** förenklar och gör administreringen mer skonsam för ytliga, djupa eller underminerade sår. Non-wovenväven gör att gelen kommer i tät kontakt med hela sårytan.

**IntraSite Conformable** kan användas för behandling av sparsamt till måttligt vätskande nekrotiska, gulsmetiga eller granulerade sår. Genom att skapa en fuktig sårmiljö befrämjas sårhäkningen.

## **IntraSite Conformable** ger flera fördelar:

### *Upprensande effekt*

**IntraSite Conformable** rensar skonsamt och effektivt upp orena sår. Detta sker genom att nekrotisk vävnad återfuktas och gulsmetig vävnad absorberas. Överflödigt sårsekret absorberas av förbandet och samtidigt stimuleras en autolytisk debridering (kroppens egen nedbrytning av död vävnad).

### *Formbart*

Förbandet formar sig lätt efter oregelbundna sår, oavsett form och djup. Öppna sår kan fyllas skonsamt så att sårhäkningen kan ske från sårbotten. **IntraSite Conformable** skapar då en fysisk barriär som förhindrar att såret stängs för tidigt.

### *Fuktig sårhäkning*

Vid sårytan skapar **IntraSite Conformable** en fuktig miljö. Fuktigheten gör att förbandet inte fastnar i såret och omläggningarna blir enklare och mer skonsamma utan att ömtålig vävnad skadas. En fuktig miljö befrämjar dessutom sårhäkningen.

**IntraSite Conformable** används vid behandling av kroniska sår, djupa eller underminerade kavitetssår som trycksår och t ex kirurgiska sår där såret lämnas öppet för att sekundärläka.

## **IntraSite Conformable** i praktiken:

1. Öppna förpackningen helt.
2. Lyft ut förbandet från förpackningen och veckla ut det om så krävs.
3. Applicera förbandet genom att löst fylla kaviteten eller täcka såret, beroende på sårets djup eller form. Applicera förbandet "fluffigt" och klipp inte i förbandet.
4. Täck med lämpligt ytterförband som t ex film (**OpSite Flexigrid**)<sup>®</sup> eller absorberande förband (**Allewyn**)<sup>®</sup>.
5. Avlägsna förbandet genom att lyfta bort det från såret, skölj med koksalt eller enligt lokala rutiner.

Se till att alla förbandsrester avlägsnas.

Omlägningsfrekvensen är beroende av sårets tillstånd och sekretion. Initialt rekommenderas dagliga omläggningar för att successivt reduceras till var tredje dag.

## *Försiktighet*

Vid överkänslighet mot någon av ingredienserna i **IntraSite Conformable** bör försiktighet iakttagas. Förbandet ska inte sväljas och inte användas på såriga bröstvårtor.

<b>IntraSite Conformable</b>			
Art nr	Storlek	Mängd gel	Förpackning
66000324	10 x 10 cm	7,5 g	10 st
66000325	10 x 20 cm	15 g	10 st
66000326	10 x 40 cm	30 g	10 st



*Ytterligare beredningsformer inom IntraSite sortimentet:* **IntraSite Gel** är hydrogelen som inte rinner. **IntraSite Gel** består av 77% vatten, propylenglykol och karboxymetylcellulosa.

<b>IntraSite Gel</b>		
Art nr	Storlek	Förpackning
7308	8 g	10 st
7311	15 g	10 st
7313	25 g	10 st



Vetenskaplig dokumentation finns tillgänglig vid förfrågan.

<sup>®</sup> Varumärke från **smith&nephew** © Smith & Nephew 2004.06

## Wound Management

Smith & Nephew AB, Box 143, 431 22 Mölndal, SVERIGE  
Tel 031-746 58 00 Fax 031-87 05 31

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

[www.smith-nephew.se](http://www.smith-nephew.se)

[www.woundbedpreparation.com](http://www.woundbedpreparation.com)