

# Prontosan®

För spolning och upprensning av sår med biofilm

## Bruksanvisning

### Egenskaper:

- Löser upp och avlägsnar biofilm, cellrester, fibrinbeläggning, nekrotisk vävnad mm
- Skyddar granulationsvävnad och epitelisering
- Förebygger infektion
- Säkerställer en sårmiljö som främjar sårhäkning
- Reducerar snabbt lukt och är smärtfri för patienten
- Kan användas med samtliga förband på marknaden
- Ekonomisk fördelaktig då sårbehandlingstiden väsentligt reduceras
- Prontosan är hållbart i upp till 8 veckor efter bruten förpackning
- För upprepat och långvarigt bruk

### Indikation:

- För avlägsning av biofilm i svårårläta sår, akuta sår, I och II gradens brännskador, strålskadad hud samt kemiskt orsakade sår. Prontosan gel X kan även användas till III och IV gradens brännskador
- För att reducera risken för infektion i såret
- För att lossa förband som fastnat i såret


### Produktbeskrivning:

- Luktfri, steril, bruksklar lösning bestående av Polyhexanid (PHMB) och Betain
- Dermatologiskt oskadlig
- Hög vävnadstolerans, även hos allergiker
- CE-märkt, Klass III – medicinteknisk produkt

## Wound Bed Preparation med Prontosan®

### Optimal förberedelse

Såret spolats kortvarigt med Prontosan Sårspolvätska för att ta bort lösa beläggningar. Dränk sedan in en kompress med Prontosan Sårspollösning och låt den ligga över såret i 10–15 minuter. Därmed bryts ytspänningen i biofilmen, så att upprensningen blir mer effektiv. Avsluta med att torka av såret med en kompress. Om det gamla bandaget sitter fast i såret, vät förbandet och låt det verka ett ögonblick.

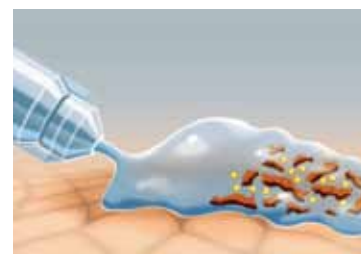


*Tensiden Betain i Prontosan® Sårspolvätska bidrar till en effektiv upprensning.*

**Bäst effekt ses i kombination med efterföljande användning av Prontosan Sårigel.**

### Behandling av ytliga sår

Efter spolningen samt behandling med indränkt kompress så appliceras Prontosan Sårigel från den praktiska 30ml flaskan varpå det vanliga förbandet appliceras. Sårets yta bör alltid vara täckt med ett lager av gel på 3–5 mm.

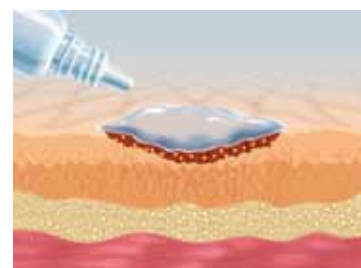

### Behandling av djupa sår

Efter spolning med spolvätskan så skall den belagda ytan i det djupa såret täckas med ett lager på minst 3–5 mm gel. Därefter bandageras såret som vanligt. Lokala rutiner och val av förband bestämmer då byte skall ske.



### Sortimentsöversikt

Artikelnr	Produktnamn	Förpackning
400 413	Prontosan® sårspolvätska, engångsampull 40 ml	30 x 40 ml
400 415	Prontosan® sårspolvätska, flaska 350 ml	10 x 350 ml
400 446	Prontosan® sårspolvätska, flaska 1000 ml (med upphängningsanordning i botten)	10 x 1000 ml
400 515	Prontosan® sårigel 30 ml	20 x 30 ml
400 517	Prontosan® gel X, tub 50 gr	20 x 50 gr
400 508	Prontosan® gel X, tub 250 gr	20 x 250 gr

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**B. Braun Medical AB**  
Box 110  
182 12 Danderyd  
Tfn 08-634 34 00  
Fax: 08-634 34 34  
mail: info.sverige@bbraun.com  
www.bbraun.se