



Hydrocoll®

hydrocolloid-förband med snabb absorption

Hydrocoll är ett självhäftande, absorberande hydrocolloidförband

Hydrocoll kan behållas på vid dusch och bad



Hydrocoll finns i många olika storlekar och former

Hydrocoll®

Hydrocoll är ett självhäftande, absorberande hydrocolloid-förband täckt av en semipermeabel polyuretanfilm som hindrar bakterier och väta att tränga in. När exudat från såret absorberas sväller de hydrocolloidala partiklarna, i matrix-struktur och bildar en gel som fyller sårhålan och behåller sårområdet fuktigt. Den bildade gelen fortsätter att absorbera till hydrocolloidet är mättad.

Egenskaper

Genom sin höga andel hydroaktiva colloider har Hydrocoll extra bra absorptionsförmåga och är därför även lämplig för sår med sekretion, exsudat tas snabbt upp och hålls kvar i förbandets struktur.


På så sätt kan mikrocirkulationen i sårområdet samtidigt ökas, vilket hjälper till att aktivera kroppens egna reningssystemer, speciellt vid kroniska tillstånd med dålig läkningsfrekvens.

I granulationsfasen, ökar Hydrocoll bildandet av ny vävnad genom att stimulera aktiviteten av fibroblaster, vilka till största delen ansvarar för igångsättningen av processen att nybilda vävnad.


Hydrocoll behåller sårområdet fuktigt, vilket skyddar granulationsvävnaden från uttorkning utan risk för att exsudat ökar i såret, även om förbandet sitter på under en längre tid.

Under epitelialiseringssfasen stöder Hydrocoll, genom den fuktiga sår miljön, epitelens celledelning och cellvandring. Man kan här förlänga bytesintervallen, dock bör förbandet inte sitta längre än sju dagar. Kontroll av sårområdet underlättas av att plattorna är transparenta.

Sortiment	Storlek	Avd.förp (Afp)	Art.nr.	Transp. förp.
<u>Steril</u>				
<u>enstycksförpackad</u>				
Hydrocoll	5x5 cm	10 st	900947	8 Afp
	7,5x7,5cm	10 st	900948	8 Afp
	10x10 cm	10 st	900938	8 Afp
	15x15 cm	10 st	900939	8 Afp
	20x20 cm	10 st	900940	8 Afp
Hydrocoll strip	5x25 cm	10 st	900955	6 Afp
Hydrocoll sacral	18x18 cm	10 st	900945	8 Afp
	20x20 cm	10 st	900944	8 Afp
Hydrocoll concave	15x13,5 cm	10 st	900946	8 Afp
Hydrocoll thin	5x5 cm	10 st	900953	8 Afp
	7,5x7,5cm	10 st	900954	8 Afp
	10x10 cm	10 st	900942	8 Afp
	15x15 cm	10 st	900943	8 Afp

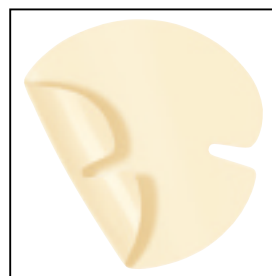

Hydrocoll® concave - version speciellt för armbågar och hälar

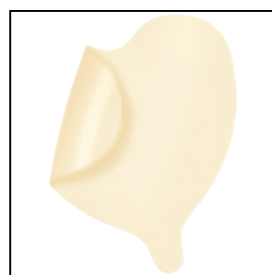

Hydrocoll® sacral
Version speciellt för det sacrala området.



Hydrocoll kan behållas på vid dusch och bad.

Det gelformade skiktet förhindrar att Hydrocoll fastnar i såret. Förbandet kan tas bort smärtfritt utan att skada granulationen och den nybildade vävnaden.

Det övre lagret tjänar som en säker barriär mot bakterier och skyddar såret från infektion och inträngande fukt. Patienten kan duscha och bada med förbandet på.

Hydrocoll thin har en lägre absorptionskapacitet och kan med fördel användas i epitelialiseringssfasen.

Användningsområde

För behandling av kroniska, långsamt läkande sår där granulationsfasen inte fungerar tillfredsställande, som t. ex. venösa bensår, trycksår, för behandling av 2:a gradens brännskador och tagställen.

Förbandet kan även användas till ocklusionsbehandling för olika typer av hudsjukdomar, under överinseende av läkare.

Kontraindikationer

Hydrocoll får inte användas där ben, muskler och senor ligger fritt, vid kliniskt infekterade sår, diabetesfotsår, svampinfektioner eller vid 3:e gradens brännsår. Riskpatienter såsom diabetiker bör kontrolleras extra noga vid användning.

Material

Plattorna är sammansatta av syntetiska elastomer och natrium-carboxymethylcellulosa (NaCMC), i matrix-struktur täckt med en semipermeabel polyuretanfilm. Plattan innehåller inget gelatin eller kolofonium.