

# SafeSwab

## Behållare med 5 fack och lock

SafeSwab är en 5-delad plastbehållare med lock som används för säker kontrollräkning och avfallshantering av operationsdukar.

### Användning:

- Efterhand som en förpackning med op.duk öppnas placeras dess etikett på utsidan av SafeSwab-behållaren.
- Efter kontroll av op.duk samla ihop den och placera i ett fack, med röntgentråden väl synlig.
- När burkens fem fack är fyllda med var sin op.duk sätts locket på.
- Stapla burkarna på lämplig plats.
- Sluträkning och kontroll görs enkelt och hygieniskt.
- Burkarna kan också vägas för att beräkna blödning. Kontakta oss för Viktprotokoll.



Material: PET (ca 80% återvunnet material)  
 Förvaring: Rent och torrt i rumstemperatur  
 Destruktion: Produkt: förbränning.  
 Förpackningsmaterial: Återvinningsbart  
 CE-märkt: Direktiv 93/42/EEC Class I Sterile / non-Sterile



## SafeSwab

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Avd./Trpt.fp
60SRL810S	SafeSwab steril	ø 24 cm	24 (2 x 12)
60SRL810	SafeSwab osteril	ø 24 cm	100 (50 x 2)
60SRL809S	SafeSwab mini steril	ø 15 cm	24 (2 x 12)
60SRL809	SafeSwab mini osteril	ø 15 cm	200 (50 x 4)
SWAB805	Rostfri väggställare för förvaring av osterila SafeSwab		1
SWAB806	Rostfri ställning på hjul för 4 behållare och lock		1

Trpt.fp. = min.kvant/best



**TILLVERKAD I SVERIGE**

## Mediplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö  
 Tel kundtjänst: 040-671 23 00  
 mediplast.info@mediplast.com