

SafeSwab 5-delad behållare med lock

SafeSwab är en 5-delad plastbehållare med lock som används för säker kontrollräkning och avfallshantering av operationsdukar.

Användning:

- Efterhand som en förpackning med op.duk öppnas placeras dess etikett på utsidan av SafeSwab-behållaren.
- Efter kontroll av op.duk samlas ihop den och placeras i ett fack, med röntgentråden väl synlig.
- När burkens fem fack är fyllda med var sin op.duk sätts locket på.
- Stapla burkarna på lämplig plats.
- Sluträkning och kontroll görs enkelt och hygieniskt.
- Burkarna kan också vägas för att beräkna blödning. Kontakta oss för Viktprotokoll.



Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Avd./trsp.fp
60SRL810S	SafeSwab steril	Ø 24cm	2x12 / 24
60SRL810	SafeSwab	Ø 24cm	50x4 / 200

SAFESWAB MINI Ø 15cm INTRODUCERAS 2016

Tillbehör:

SWAB811 Rostfri vägghållare för förvaring av osterila SafeSwab

SWAB806 Rostfri ställning på hjul för 4 behållare och lock

Material: PET (ca 25% återvunnet material)

Förvaring: Rent och torrt i rumstemperatur

Destruktion:

Produkt: förbränning

Förpackningsmaterial: Återvinningsbart

Tryckfärg: vattenbaserad

CE-märkt enl direktiv 93/42/EEC Class I Sterile / non-Sterile

Förvaras torrt och svalt, gärna i förpackningen

Trsp frp = minsta försäljningsenhet

