

Sanifix absorberande boxertrosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa för barn. Byxan är av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genomvätning. Byxan passar bra till barn som har droppinkontinens och har svårt att behålla engångsskydd på. Produkten kan på så sätt göra det möjligt att fortfarande klara toalettbesöken själva utan att riskera läckage. Produkten passar även bra för de som är känsliga för klister. Klarar ca 100 tvättar, 60 °C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Kan torktumlas på låg värme.



Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxertrosa				
Art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Storlek/ålder	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11+ år
Mått höft/stuss	46-54 cm	52-64 cm	54-66 cm	56-70 cm	64-84 cm
Mått midja	40-50 cm	44-60 cm	50-64 cm	54-68 cm	60-80 cm
Mått benöppning	28-36 cm	30-40 cm	32-42 cm	34-44 cm	36-46 cm
Vikt/produkt	39 g	47 g	50 g	52 g	62 g
Teoretisk abs.kap. ISO 11948-1 ml	200 ml				
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml				
Färg	Vit				
Antal/förpackning	1 st				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex 70 % Viskos, 30 % Polyester Polyuretan				
Krypning	<5 %				
Antal tvättar	Ca 100 st (normal hushållstvätt)				
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.				
Förvaring	Rumstemperatur				
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.				

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 6401, 6402, 6403, 6404, 6405

Användaranvisning

- Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet.
- Storleken mäts runt midjan.
- Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion.
- Vid tvätt tvättas hela produkten inklusive ilägg.
- Tvätta produkten före användning för att aktivera absorptionsförmågan.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läke-medelsverket.



SRN SE-MF-000033314



SWERECO



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240