



## DET EFFEKTIVA SÅRKONTAKTLAGRET

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte<sup>1,2</sup>
- Kan sitta kvar i upp till 14 dagar<sup>3,4,5</sup> vilket ger kostnadseffektiv<sup>1,6</sup> och ostörd sårhäkning

### Safetac® -yta

- Minskar smärta och vävnadsskada innan, under och efter förbandsbyte<sup>7</sup>
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration<sup>8</sup>

### Polyamidnät

- Öppen nätstruktur möjliggör effektiv transport av sårsekret samt att lokal behandling kan appliceras t.ex. salvor
- Transparent




### Safetac® -teknologi


#### Safetac® -teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information besök [www.safetac.se](http://www.safetac.se)

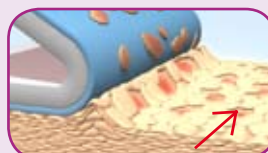


Hudceller dras av (hudstrippning) med traditionell vidhäftning

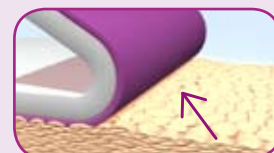


Få eller inga hudceller dras av med Safetac-teknologi


## Så här används Mepitel®

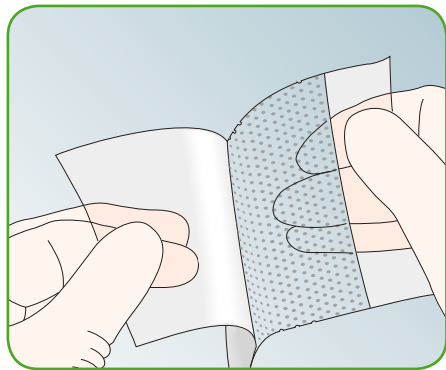

Rengör sårområdet.  
Ta bort skyddspappret.

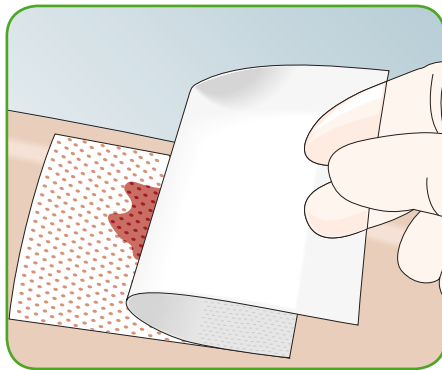

Lägg på Mepitel på såret.

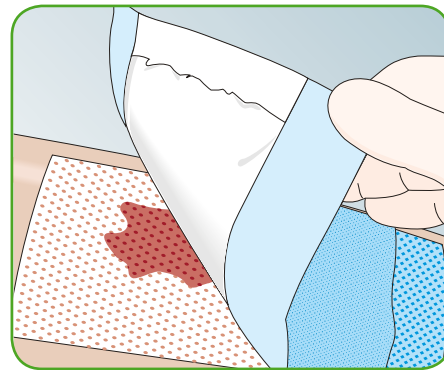

Lägg på ett absorberande ytterband.

## Så här fungerar Mepitel

Mepitel kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar<sup>3,4,5</sup>, beroende på sårets tillstånd, vilket möjliggör ostörd sårsläkning. Den öppna nätstrukturen låter sårsekret passera till ett absorberande ytterförband. Mepitel förhindrar ytterförbandet från att fastna i såret vilket minskar smärta och vävnadsskada i samband med förbandsbyte. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden och minskar risken för maceration.

## Fördelar med Mepitel

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbytet
- Kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar vilket ger ostörd sårsläkning
- Låg bytesfrekvens
- Minskar risken för maceration
- Bibehållna produkttegenskaper över tid - lämnar inga rester och torkar inte ut
- Transparent för att underlätta inspektion av såret vid applicering och under bårtiden
- Följsam och bekväm att bära
- Stannar på plats
- Låg risk för hudirritation och allergi



## Användningsområden

Mepitel kan användas på ett stort antal sår, t.ex. hudflikar, skrubbsår, lacerationssår, blåsor, brännskador, transplantatfixering, diabetiska fotsår, venösa och arteriella bensår, smärtsamma sår.

## Varning

När Mepitel används på brännskador som behandlas med meshat transplantat eller efter ansiktsslipningar kan förbandet ge avtryck om det ej används korrekt.

## Observera

- Såret bör inspekteras för att upptäcka tecken på infektion i enlighet med klinisk praxis. Rådgör med vårdpersonal för lämplig behandling.
- När Mepitel används på brännskador som behandlas med meshat transplantat: undvik att utsätta förbandet för onödigt tryck.
- När Mepitel används på ansiktsslipningar: undvik att utsätta förbandet för tryck, ta av och sätt på förbandet igen minst varannan dag.
- När Mepitel används på blödande sår eller sår med segt sårsekret ska det täckas med ett fuktigt absorberande förband.
- När Mepitel används för transplantatfixering ska förbandet inte bytas före femte dagen efter applicering.

MEPITEL levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
290510	5 x 7,5	10	50
290560	5 x 7,5	2	16/128
290710	7,5 x 10	10	40
291010	10 x 18	10	70
292005	20 x 30	5	30