

Vasofix® Safety Vår erfarenhet – din trygghet

Säkerhet du kan lita på



Säkerhet är beroende av kvalitét

- Säkert handhavande med ett integrerat stickskydd. Kan ej handhas felaktigt eller manipuleras så att det blir inaktivt.
- Lätt använd, ingen ny stickteknik behöver läras in, samma grepp i handen som du är van vid.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Vasofix® Safety

Känn dig trygg och bekväm - i alla situationer

Tillförlitlighet och funktionalitet är avgörande för att användare och patient ska känna komfort och säkerhet. Venpunktion är en stressad situation och för att göra din och patientens upplevelse mindre traumatisk har vi tagit fram en optimerad produkt, baserad på flera decenniers erfarenhet av perifer venpunktion.

Vasofix® Safety gör att du och din patient känner er bekväma i varje skede av kateterinläggningen genom sin kombination av sofistikerade säkerhetsfunktioner och praktisk design.

Säkerhetsmekanismen kan inte manipuleras så att den blir inaktiv, vilket är en unik egenskap. En annan stor fördel är att den är lättanvänd. Du slipper lära in ny teknik och har samma grepp i handen som du är van vid. Även enhandsgrepp fungerar. Risken för oavsiktliga stickskador och infektion minimeras genom en självaktiverande clipsteknik. Stickskyddet aktiveras av sig självt direkt när nålen lämnar katetern, vilket skyddar dig och dina medarbetare i alla situationer.



Säkerhetsfunktion 1: Väl genomtänkt nåldesign

- Kanylens utformning tränger lätt igenom hud och ven, minimerar punktionstrauma.
- Lågt motstånd vid punktion, passar olika stickvinklar.
- Vass nål minskar smärta och obehag hos patienten.



Säkerhetsfunktion 2: B. Brauns eget säkerhetsclips

- Integrerat stickskydd som är skyddad i hub och aktiveras automatiskt. Kan ej handhas felaktigt eller manipuleras så det blir inaktivt. Leder till ett säkert handhavande.
- Lågt och jämt motstånd att dra ut. Påverkar ej handhavandet.
- Tar liten plats i riskavfallshandlingen.



Säkerhetsfunktion 3: Optimerade glidegenskaper och klart synligt backflöde i katetern

- Transparent kateter med långsgående röntgentäta linjer gör det lätt att se att katetern ligger rätt.
- Finns i FEP och FUP.
- Tydligt backflöde syns i katetern, ser att katetern ligger rätt.



Vår erfarenhet – din säkerhet

Sticksyddet du verkligen kan lita på.

Vascular Access

Komplett sortiment

- B. Braun erbjuder katetrar anpassade efter ventillstånd, punktionsställe och patientens ålder.

Unika fördelar

- Gul 0,7 x 19mm med injektionsport avsedd för barn, sköra kärl samt svårstuckna patienter. Klarar 1,3 liter per timme.
- Rosa kort 1,1 x 25mm passar bra till handrygg, minskar risk för tromboflebit.



Säkerhetsfunktion 4:

Ergonomisk kammare med hydrofobt blodfilter.

- Ergonomiskt utformad grepp-platta för säkert och bekvämt handhavande.
- Transparent kammare ger snabb bekräftelse på blodsvär.
- Hydrofobt blodfilter, minimerar blodexponering.



Säkerhetsfunktion 5:

Hygieniskt utformad injektionsport

- Designad så att port ej öppnas oavsiktligt, minskar risk för kontamination.
- Låsbar hygienisk injektionsport, unik egenskap.
- Injektionsportens placering ger minimerad mekanisk retning av ven och omgivande hud.




Säkerhetsfunktion 6:

Flexibla vingar

- Flexibla mjuka vingar anpassade till hudtytan för bästa patient-bekvämlighet.
- Färgade vingar finns i två storlekar för en säker fixation. Inga vassa kanter.
- Hål för ventilation och suturering.

Stickteknik Vasofix® Safety

Vascular Access

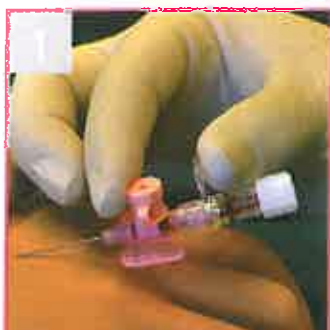




Kontrollera katetern, fäll ut vingarna. Lossa lite på den vita hygienproppen. Rengör huden enligt sjukhuset riktlinjer. Använd samma stickteknik som du är van vid.



När blodsvär erhålls, dra ut kanylen ca 5 mm och för in hela katetern i kärlet med kanylen kvar som ledare. Släpp stasen.



Fixera katetern med kanylen kvar: Tejpa gärna katetern...
... eller håll emot med tummen på vinge/port
... och ockludera med pekfingeret då kanylen dras ur.
Pressa pekfinger ovanför kateterspets för att undvika blodläckage.
Ett visst motstånd känns när kanyl dras ut. Anslut hygienpropp eller trevägskran och fixera.

Produkt	Storlek i Gauge	Kateter diam/längd mm	Flödes hastighet ml/min	Artikelnr. Vasofix® Safety
Katetermaterial PUR (Polyuretan)				
	24G	0,7 x 19	22	4269071S-01
	22G	0,9 x 25	36	4269098S-01
	20G	1,1 x 25	65	4269217S-01
	20G	1,1 x 33	61	4269110S-01
	18G	1,3 x 33	103	4269330S-01
	18G	1,3 x 45	96	4269136S-01
	17G	1,5 x 45	128	4269152S-01
	16G	1,7 x 50	196	4269179S-01
	14G	2,2 x 50	343	4269225S-01
Antal i förpackning 200 st (4 x 50 st)				



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AB
Box 110, 182 12 Danderyd
Svärdsvägen 21
Tel. 08-634 34 00
Fax. 08-634 34 34
www.bbraun.com e-post: info.sverige@bbraun.com