

Vasofix® Safety

Säkerhetskanyl med injektionsport



Skyddar dig och dina medarbetare mot nålsticksskador och dess tänkbara följder.

B | BRAUN

Självaktiverande nålsticksskydd ...




"Nu känns allt bra men väntan var hemsk."

Alla har säkert hört talas om att sjukvårdspersonal råkat ut för stickskador som fått fatala konsekvenser.

Ju snabbare du måste agera desto större är risken för stickskador. Om ambulansen t ex kör över ett gupp i vägen eller patienten rycker till finns stor risk att kanylen slinter och oavsiktligt sticker någon. Stressen och ovissheten hos den som blivit stucken är påtaglig: "Kommer det bli ett positivt svar? Hepatit A, B eller C eller HIV?"

Bättre sticksskydd är något som länge efterfrågats – och här kommer svaret i och med introduktionen av Vasofix® Safety!

Vasofix® Safety har ett speciellt utformat självaktiverande clips som löser ut direkt när kanylen dras ur katetern. Detta minimerar risken för stickskador där blodburna virus är som mest aktiv.

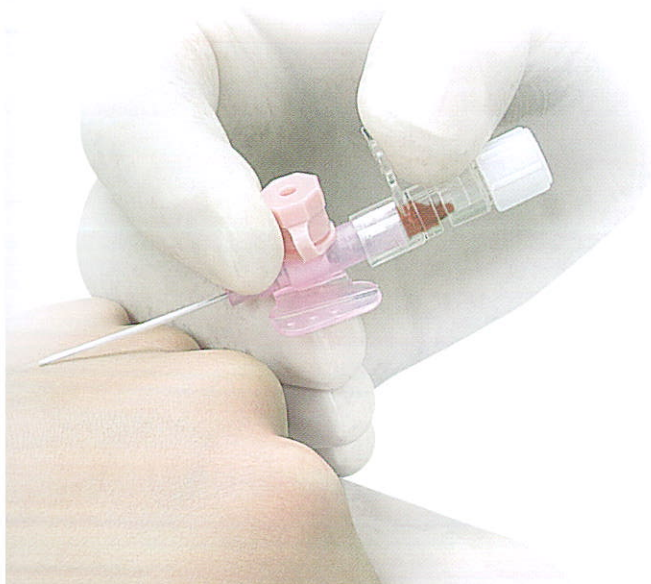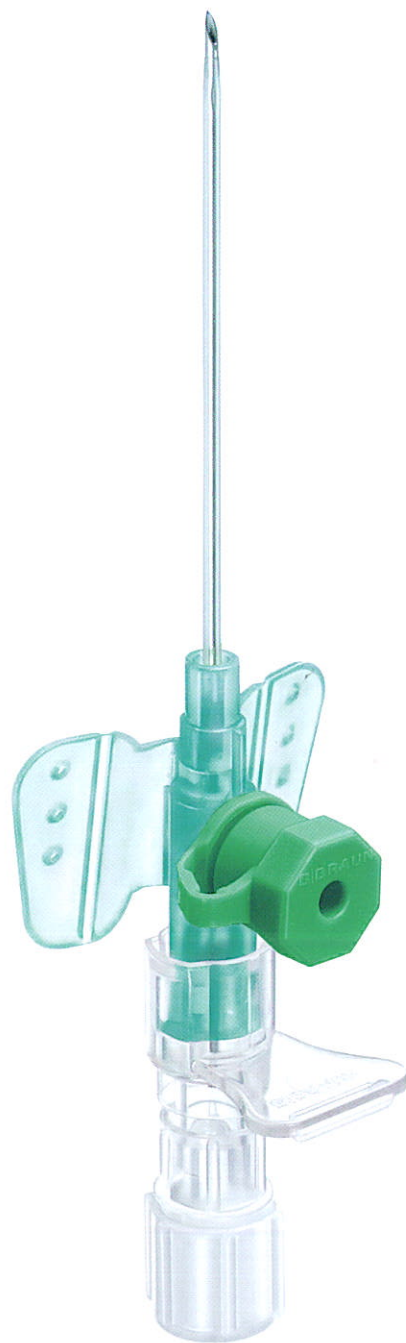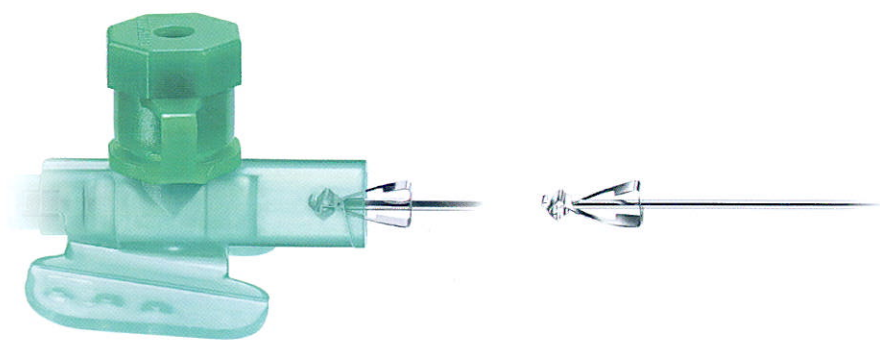

skala 2 : 1

... fortsatt lika enkel att använda

Ingen ny teknik behöver läras in
- nålen hanteras som vanligt.

Med nya Vasofix® Safety använder du samma teknik som du är van vid.

Enda skillnaden som känns är ett visst motstånd när metallkanylen dras ur och går igenom säkerhetsclipset.

Säkerhetsfördelar


- Självaktiverande stickskydd
- Elimineras möjligheten att återinföra kanylen
- Säkerhetsmekanismen kan ej manipuleras
- Stickskyddet aktiveras direkt när kanylen lämnar katetern
- Ingen ny stickteknik behöver läras in

B | BRAUN



Lågt motstånd vid punktion

Kanylens skarpa elektropolerade spets och den mikrosilikoniserade kateterytan ger en mjuk, säker punktion. För patienten innebär detta mindre smärta och obehag.

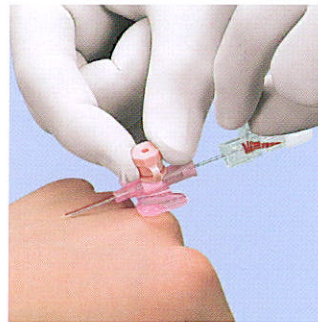

Dubbel backflödeskontroll

Den transparenta greppdelen med hydrofobt filter ger tillsammans med plastkatetern snabbt en tillförlitlig bekräftelse på att katetern är i blodkärllet när nålen dras ur.



Längsgående röntgentäta linjer

I polyuretankatetern finns 4 längsgående röntgentäta kontrastlinjer som snabbt kan spåras om någon del av katetern olyckligtvis skurits av.














Injektionsport

Injektionsportens placering, rakt över vingarna, möjliggör en snabb och säker läkemedelsadministrering.














Produktspecifikation



Produkt	Storlek i Gauge	Kateter diameter/längd i mm	Flödes hastighet ml/min	Artikelnr. Vasofix® Safety	Artikelnr. Mandrin
				Katetermaterial PUR (Polyuretan)	
	 24G	0,7 x 19	22	4269071S	-
	 22G	0,9 x 25	36	4269098S	4215095
	 20G	1,1 x 25	65	4269217S	4215117
	 20G	1,1 x 33	61	4269110S	4219104
	 18G	1,3 x 33	103	4269330S	4219139
	 18G	1,3 x 45	96	4269136S	4219120
	 17G	1,5 x 45	128	4269152S	4215150
	 16G	1,7 x 50	196	4269179S	4219171
	 14G	2,2 x 50	343	4269225S	4219201
Antal i förpackning: 200 st (4 x 50st)					ISO 10555-1/5

Vasofix® Certo

Produkt	Storlek i Gauge	Kateter diameter/längd i mm	Flödes hastighet ml/min	Artikelnr. Vasofix® Certo	Artikelnr. Mandrin
				Katetermaterial PUR (Polyuretan)	
	 24G	0,7 x 19	22	4269071	-
	 22G	0,9 x 25	36	4269098	4215095
	 20G	1,1 x 25	65	4269217	4215117
	 20G	1,1 x 33	61	4269110	4219104
	 18G	1,3 x 33	103	4269330	4219139
	 18G	1,3 x 45	96	4269136	4219120
	 17G	1,5 x 45	128	4269152	4215150
	 16G	1,7 x 50	196	4269179	4219171
	 14G	2,2 x 50	343	4269225	4219201
Antal i förpackning: 200 st (4 x 50 st)					ISO 10555-1/5

B | BRAUN

B. Braun Medical AB
Tel: 08-634 34 00
Fax: 08-634 34 34
e-post: info.sverige@bbraun.com
order.sverige@bbraun.com