

Nya ALLEVYN Gentle Border Multisite har en unik treklöverformad design som gör den till det självklara valet för svårbandagerade områden.

Bak huvud
 Förbandet skyddar samtidigt som det är skonsamt mot ömtålig hud.

Nacke
 Omläggning av tracheostomier kan vara en utmaning på grund av de känsliga områdena på och runt halsen.

Armhåla
 Flexibiliteten i förbandet gör att det formar sig väl efter armhålans konturer.

Bröst
 Förbandet är följsamt mot huden samtidigt som det är formbart och passar sår på olika områden kring bröstet.

Knä
 Förbandet sitter på plats samtidigt som de ger full flexibilitet i knäleden.

Axlar
 Förbandet formar sig efter området och ger komfort och skydd.

Rygg
 Formen och förbandets flexibilitet gör den lämplig för alla sår på ryggen.

Armbåge
 Förbandet är idealiskt för bandagering av benuskott som tex. på armbågen då den tillåter rörelse i leden samtidigt som den är följsam.

Lår
 Passar lårets runda form väl och ger skydd för såret.

Vad
 Förbandets flexibilitet ger enkel applicering. Det skonsamma silikonet tillåter omplacering av förbandet utan att det förlorar sin häftande förmåga.

Börja med att ta bort skyddsfilm från förbandet. Se till att hela sårytan täcks.

Det går att klippa i ALLEVYN Gentle Border Multisite, använd alltid aseptisk teknik. Se till att utsatta områden är täckta med ett lämpligt filmförband för extra fixering, täck inte över hela förbandet.



Beställnings information:

Artikel nr.	Strl (cm)	Fp/strl
66800959	ALLEVYN Gentle Border Multisite 17,1 x 17,9 cm	10
66801041	ALLEVYN Gentle Border Lite Multisite 8 x 8,4 cm	10

Referenser

1. Smith & Nephew Data on File Report OR- 017 Volunteer trial. An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing.
 *Mepilex Border 15cm x 15cm

Advanced Wound Management
 Smith & Nephew AB
 Box 143
 431 22 Mölndal
 T +46 (0) 31 746 58 00
 F +46 (0) 31 87 05 31

sn@smith-nephew.com
 www.smith-nephew.com

[®]Trademark of Smith & Nephew
[™]All trademarks acknowledged
 © Smith & Nephew Januar 2012
 29606