


GRAVIDITETSTEST

Urin-hCG ■ FHC102

Avläsning av resultatet:

- 1 linje i fält T och 1 linje i fält C:
Gravid (positiv)
- 1 linje i fält C:
Inte gravid (negativ)
- Inga linjer eller bara linje i fält T:
Misslyckat test

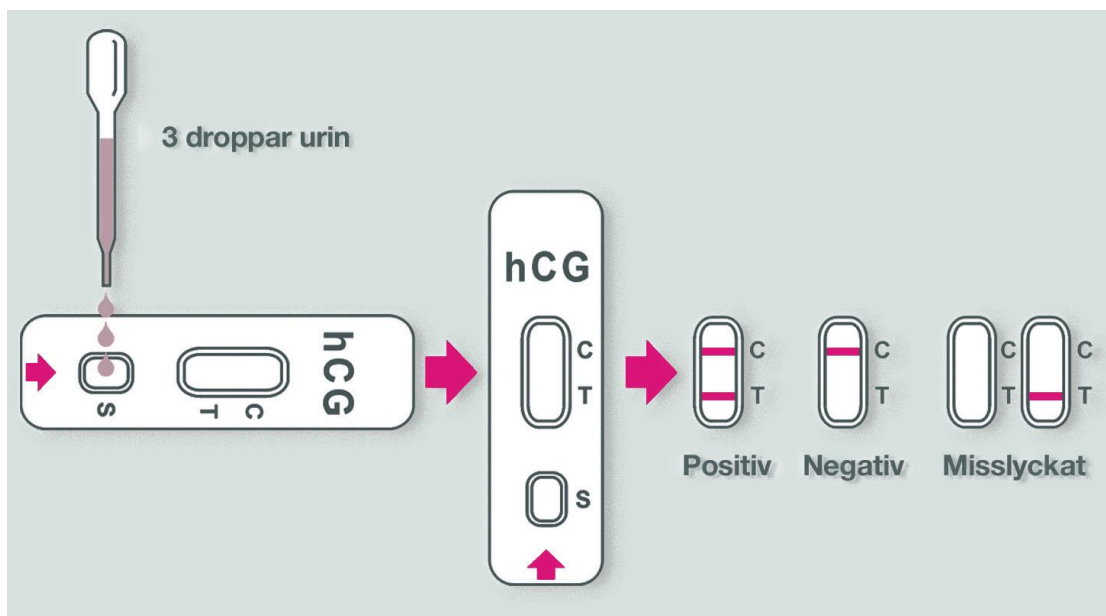

GRAVIDITETSTEST

Urin-hCG ■ FHC102

Förvaras i rumstemperatur

Analys:

1. Samla urinprovet i en ren mugg
2. Droppa 3 droppar urin i testfältet märkt S
3. Vänta 3 minuter innan du avläser resultatet. Skall läsas inom 3-4 minuter.

Teknisk beskrivning:

Testet reagerar positivt (gravid) vid U-hCG-koncentration högre än 25 mIU/ml. Det anbefalas at testa från förste dagen för utebliven menstruation. En molekylanalys mäter molekyler med alpha-hCG och beta-hCG. Färgmedlet är colloidal gold. Testen får inte utföras på makroskopiskt blodig urin (hemoglobin > 500 mg/dl). FDA-godkänt och CE-Märkad.

Innehåller:

En foliepåse innehåller ett plattformstest och en pipett.
Instruktion och produktinformation



Hållbarhet:

Se förpackningen
Artikelnummer: FCH 102



MediGroup ApS, Kajerødgade 38, DK-3460 Birkerød

Tlf. +45 4576 5425, Fax +45 4576 5725