

Säkerställ ett sterilt incisionsområde



3M Steri-Drape™ 2 incisionsfilm


Den vanligaste källan till postoperativ sårinfektion är patienten själv. Den normala bakteriefloran på huden kan ge upphov till besvärliga infektioner om de kontaminerar operationssåret. Med en incisionsfilm upprättar man en mekanisk barriär som hindrar bakterier från huden kring operationssåret att kontaminera såret.

Steri-Drape™ 2 incisionsfilm

Med en incisionsfilm upprättar man en mekanisk barriär som hindrar bakterier från huden kring operationssåret att kontaminera såret. Filmen är semipermeabel, vilket betyder att den tillåter huden att andas men inte ger bakterier möjlighet att tränga igenom. Genom att huden tillåts andas genom incisionsfilmen säkerställs en förbättrad vidhäftning.

Häftämnet på Steri-Drape™ 2 incisionsfilm är detsamma som gjort Micropore™ känt för sin hudvänlighet och goda vidhäftning. Varken film, häftämne eller förpackning innehåller latex.

Steri-Drape 2 incisionsfilm har en god flexibilitet vid applicering och anpassas väl till kroppskonturer. Vid applicering hålls filmen över incisionsområdet och appliceras från mitten ut mot kanterna för att förebygga att det uppstår spänningar i huden. Filmen kan användas oberoende av typ av preoperativ huddesinfektion. Det är dock viktigt att huddesinfektionsmedel torkat fullständigt innan filmen appliceras. Vid borttagning rekommenderas att filmen tas bort rygg-mot-rygg efter det att såret förslutits. Vid sårslutning kan filmen närmast incisionen tas bort med pincett. Filmen bör ej penetreras med nål.

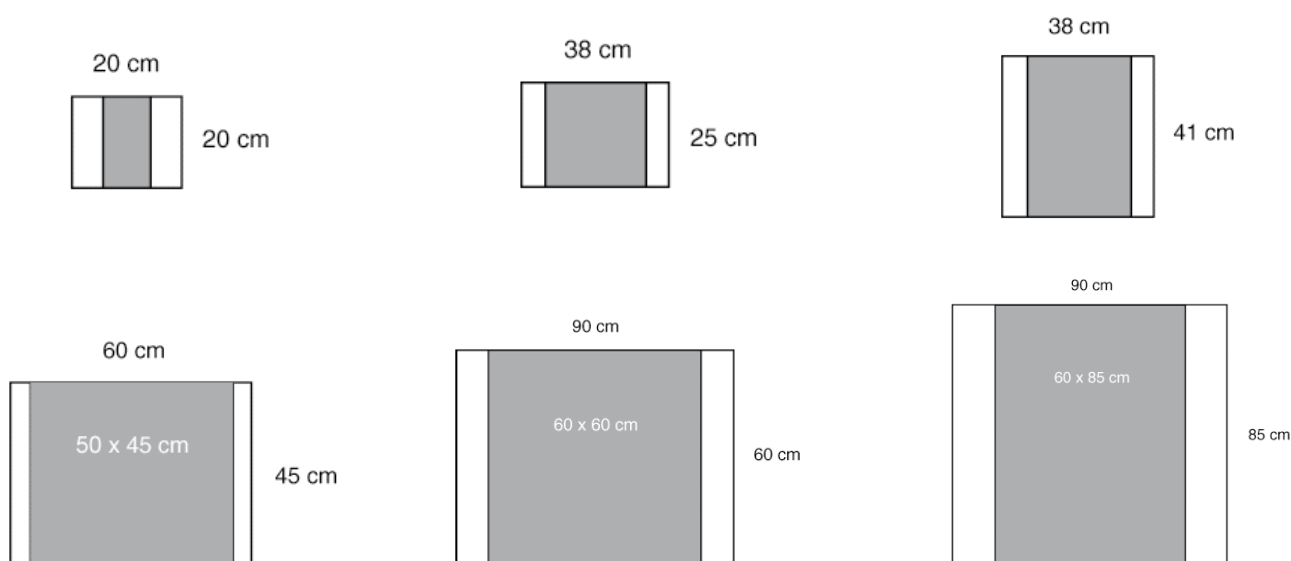

Beställningsinformation

Art nr	Produktbeskrivning	Ant/fp
2035	Steri-Drape 2 incisionsfilm 20x20cm, incisionsyta 10x20cm	10/4
2037	Steri-Drape 2 incisionsfilm 38x25cm, incisionsyta 28x25cm	10/4
2040	Steri-Drape 2 incisionsfilm 38x41cm, incisionsyta 28x41cm	10/4
2045	Steri-Drape 2 incisionsfilm 60x45cm, incisionsyta 50x45cm	10/4
2050	Steri-Drape 2 incisionsfilm 90x60cm, incisionsyta 60x60cm	10/4
2051	Steri-Drape 2 incisionsfilm 90x85cm, incisionsyta 60x85cm	10/4

Material; Polyester
Häftämne; Akrylatbaserat
Tillverkningsland; USA och Kina
Steriliseringsmetod; Gammasterilisering
Förpackning; Innerförpackning av film/papper, avd,förp kartong, levförp kartong/wellpapp
Hållbarhet; 5 år



Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se