


Mepilex[®] Ag

Absorberande antimikrobiellt skumförband


Absorberande polyuretanskum

- Absorberar sårsekret
- Formar sig lätt efter kroppens konturer
- Kan användas under kompression!

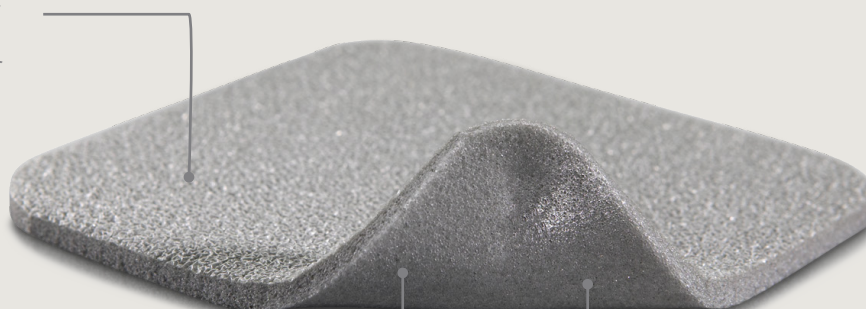

- Minskar smärta och vävnadsskada i såret och på omkringliggande hud
- Minskar risken för maceration

- Antimikrobiell effekt inom 30 minuter² och upp till 7 dagar³

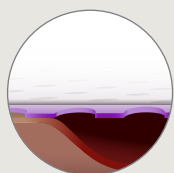

Safetac[®] teknologi


Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.




* mikrober större än 25 nm

- Snabb och ihållande antimikrobiell effekt
- Minskar smärta och vävnadsskada i såret och på omkringliggande hud
- Absorberar effektivt


Så här används Mepilex® Ag

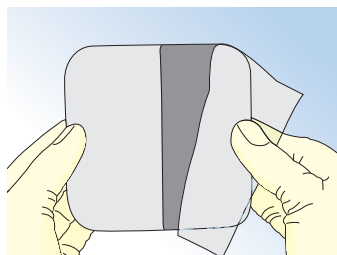

Rengör såret med saltlösning eller vatten enligt gällande kliniska rengöringsrutiner. Torka den omkringliggande huden ordentligt.

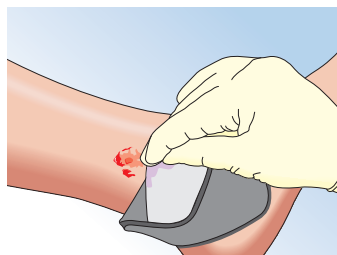

Ta bort skyddsfilmen och applicera den vidhäftande sidan på såret. Sträck inte. För bästa resultat bör Mepilex Ag överlappa den omkringliggande huden med åtminstone 2 cm. Mepilex Ag kan klippas till önskad storlek.

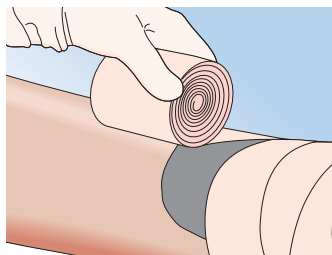

Fixera vid behov Mepilex Ag med ett bandage eller annan fixeringsprodukt ex Tubifast.

Så här fungerar Mepilex Ag

Mepilex Ag är ett antimikrobiellt skumförband med mjuk silikon som absorberar sårsekret och bibehåller fuktig sårmiljö. Mepilex Ag inaktiverar patogena mikroorganismer inom 30 minuter² med uthållen effekt i upp till 7 dagar³. Genom att minska mängden mikroorganismer kan Mepilex Ag även minska odören.

Användningsområden

Mepilex Ag kan användas på olika typer av lågt till måttligt vätskande sår så som ben- och fotsår, trycksår och delhudsbrännskador. Mepilex Ag kan även användas under kompression.

När ska Mepilex Ag användas

Om bakteriehalten i ett sår är för hög behöver den minska för att inte fördröja sårhäkningen. Mepilex Ag rekommenderas för att snabbt minska bakteriehalten. Använd Mepilex Ag till sår som inte läker normalt och som visar ökade tecken på bakteriell påverkan.

Observera

- Använd inte Mepilex Ag på patienter som är allergiska mot silver.
- Använd inte Mepilex Ag under strålbehandling, ultraljud eller magnetröntgen.
- Använd inte Mepilex Ag tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar eller väteperoxid.

Mepilex Ag levereras sterila, enstycksförpackade

Art.nr.	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
287110	10 × 10	5	70
287210	10 × 20	5	45
287310	15 × 15	5	35
287410	20 × 20	5	25
287500	20 × 50	2	10
Mepilex Heel Ag			
388100	13 × 20	5	25
388300	15 × 22	5	30



Referenser: **1.** Schumann H, Apelqvist J, Schmidchen A, Hansson C. Open, non-comparative, multicentre investigation exploring the tolerance of an absorbent foam dressing containing silver used in chronic wounds. Poster presented at the European Wound Management Association Conference, Glasgow, United Kingdom, 2007. **2.** White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. **3.** Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10.

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepilex Ag are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.