



Neo-Safe

en specialutformad provtagningsnål för barn

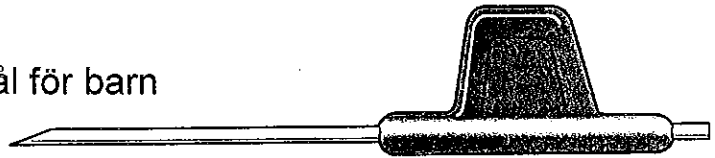

Instruktion:

1. Välj lämplig Neo-Safe storlek till barnet.
Kontrollera sterilitet och utgångsdatum före användning.
2. Utse lämpligt punktionsställe.
Desinficera och låt lufttorka.
Håll barnets hand och forma den till en liten näve.
3. Håll Neo-Safe mellan tummen och pekfingeret, det förebygger kontaminering och minskar risken för stickskador.
4. Punktera venen med Neo-Safe, använd vingen som ett riktmärke för nålens spets.
5. Vid backflöde är det viktigt att hålla barnets hand stadigt och att ha provtagningsröret i beredskap under den bakre änden av Neo-Safe för att samla upp blodet.
6. För att säkerställa blodflödet vinklas den bakre änden av Neo-Safe nedåt. Undvik alltid att "mjölka" vid provtagning.

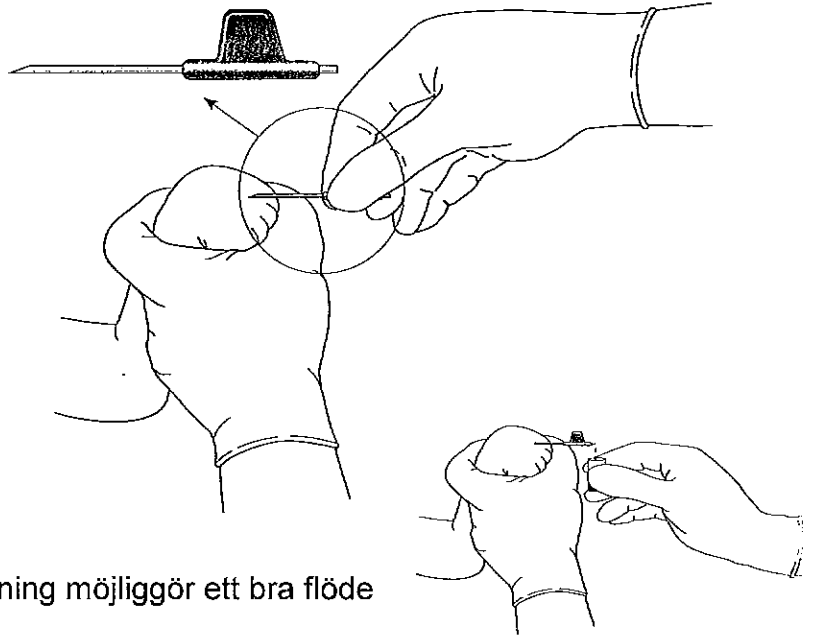

Neo-Safes fördelar är bl a:

- Lätt att använda
- Ändamålsenligt utformad
- Minskar risken för stickskador
- Ger ökad stabilitet vid provtagning
- Säker att hålla i och använda
- Spetsens tvära och tvåfasade slipning möjliggör ett bra flöde