



Bruksanvisning

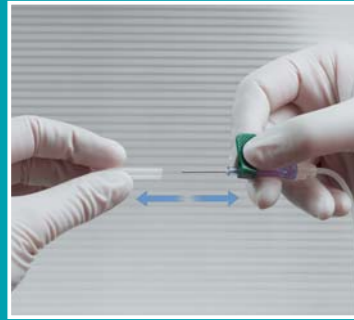


1 Ta bort skyddshylsan

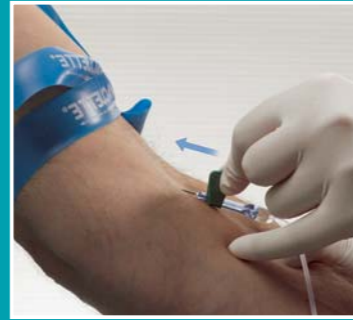


2 Venprovtagning



3 Sätt i röret

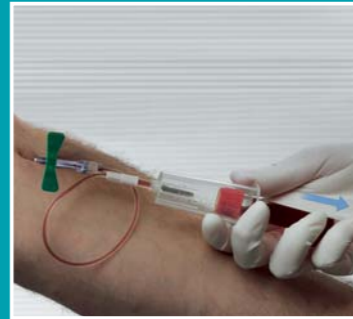

4 Ta bort det sista röret

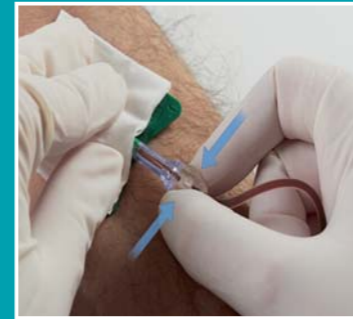

5 Aktivera säkerhetsmekanismen



6 Ta bort säkerhetssetet för blodprovtagning



7 Aktiverat säkerhetsset för blodprovtagning



8 Avfallshantering



Kuskvägen 8 | SE-191 62 Sollentuna, Sweden
Telefon +46 (0)8 752 00 30 | Fax +46 (0)8 752 03 90
info@hettichlabinstrument.se

www.hettichlabinstrument.se

Your **Power** for Health


greiner bio-one



VACUETTE®
Säkerhetsset
för blodprovtagning

Våra innovationer
för din säkerhet

www.gbo.com/preanalytics

VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning

Särskilt utvecklade för blodprovtagning av svårstuckna patienter. Skydda dig och dina medarbetare mot risken för skador genom nålstick. Varje stickskada är en för mycket.



Aktivering

Ett hörbart "klick" är ett tecken på att säkerhetsmekanismen har aktiverats helt.

Säkerhetsmekanism

Enkel aktivering av säkerhetsmekanismen genom att lätt pressa ihop båda sidorna av mekanismen.

Ett genomskinligt visningsfönster

Det genomskinliga visningsfönstret gör det möjligt att visuellt kontrollera korrekt införing i venen.

Extra säkerhet

Den extra säkerheten beror på att säkerhetsmekanismen aktiveras medan kanylen fortfarande är kvar i venen.

Större flexibilitet

Flera olika slanglängder ger större flexibilitet vid blodprovtagning.

Alternativ

användning som ett infusionsset.

VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning, kombinationsprodukter

En praktisk kombinationsprodukt VACUETTE® säkerhetsset för blodprovtagning finns förmonterat med:

VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning + Lueradapter

- ☞ Säkerhetsset med Lueradapter i steril blisterförpackning.
- ☞ Hanteringen är optimerad.



VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning + hållare

- ☞ Förmonterat set med hållare i steril blisterförpackning.
- ☞ Ingenting behöver skruvas ihop.
- ☞ En praktisk färdig lösning som sparar tid.



VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning + blododlingshållare

- ☞ Förmonterat set med blododlingshållare i steril blisterförpackning.
- ☞ Är avsett att användas tillsammans med de vanligaste blododlingsflaskorna och VACUETTE® blodprovtagningrör.
- ☞ Setet är sterilt och förmonterat för högsta bekvämlighet och kostnadseffektivitet samt säkerställer att din patient bara behöver utsättas för en enda venprovtagning för alla förfaranden.

