


Semi-permeabelfilm<sup>1</sup>

Absorberande<sup>2</sup> skumdyna  
med silversulfadiazine

Säker fixering utan  
vidhäftande<sup>3</sup> sårkontaktlager

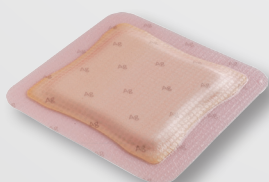

 **smith&nephew**  
**ALLEVYN<sup>®</sup>**  
Ag Adhesive

ALLEVYN® Ag Adhesive är ett förband för sårbehandling med optimal vätskehanterande förmåga tack vare den unika trippelverkande teknologin som absorberar, bibehåller och släpper igenom sårsvätska<sup>1,2,4</sup>. Resultatet blir en sårmiljö med optimal fuktbalans som främjar sårsläkning<sup>4</sup>. Tillsatsen av silversulfadiazin till förbandets hydrocellulära skumdyna ger en varaktig antimikrobiell effekt (visad *in-vitro*)<sup>5</sup>.

- Toppfilm med hög genomsläpplighet hjälper till att minimera risken för maceration i och omkring såret<sup>1,2</sup> samtidigt som filmen bildar en effektiv barriär för att minimera bakteriell belastning<sup>6</sup>
- Låg allergent fästämne<sup>7</sup> håller förbandet på plats, utan att fastna i såret<sup>8</sup>
- Formar sig efter kroppens konturer och ger en hög patientkomfort<sup>2,5</sup>
- Tillgänglig i flera storlekar vilka kan anpassas till svårbandagerade områden såsom armbågar och hälar
- Finns som sacrumförband som kombinerar hög absorption<sup>2</sup> och säker fixering i ett anatomiskt format förband.
- Effekt visad *in-vitro* mot ett brett spektrum av bakterier, bland annat antibiotikaresistenta bakterier som *Pseudomonas*, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) och Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE)<sup>9</sup>.
- Antimikrobiell effekt som kvarstår i upp till 7 dagar *in-vitro*<sup>5</sup>.

## Indikationer

ALLEVYN Ag Adhesive är indicerat för behandling av sekundärläkande ytliga granulerande sår, svårläkta och akuta vätskande sår, full- och delhudssår som trycksår, fotsår hos diabetiker, bensår, svampbelastade sår, maligna sår, infekterade sår, operationssår, tagställen, hudflikar samt första och andra gradens brännskador

## Applicering

Rengör såret enligt gällande riktlinjer. Välj ett förband av lämplig storlek. ALLEVYN Ag Gentle Border kan klippas till för att passa hälar, armbågar och andra ställen där det är svårt att applicera förband. Använd alltid aseptisk teknik när du klipper i förbandet.

Rengör och avlägsna fukt från omgivande hud. Avlägsna omgivande hårväxt för optimal vidhäftning.

Ta bort en av skyddsfilmerna och applicera förbandets vidhäftande sida mot huden. Ta bort den återstående skyddsfilm och stryk med handen över förbandet så att det ligger jämnt över såret utan att sträckas eller veckas. Förbandets skumdyna måste täcka hela sårytan. Om förbandet har klippts till, se till att exponerade områden av skumdynan täcks med lämplig film men var noga med att inte täcka hela förbandet.

När ALLEVYN Ag Adhesive Sacrum appliceras placera den smala delen av förbandet minst 2cm ovanför analöppningen, släta ut förbandet över sacrum.

## Omlägningsfrekvens

Under början av behandlingen bör ALLEVYN Ag Adhesive kontrolleras ofta enligt gällande kliniska riktlinjer. Om förbandet används på infekterade sår ska infektionen kontrolleras och behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer. Förbandet kan lämnas på plats i upp till sju dagar, förutom i sacrum där det bör bytas inom fem dagar. Förbandet ska bytas när sårets och den omgivande hudens tillstånd motiverar det eller när sårsvätska syns och närmar sig 0,5 cm från skumdynans kant. Tidpunkten för förbandsbyte bör byggas på klinisk bedömning och hänsyn bör även tas till lokala riktlinjer.



	Artikel nr.	Storlek	Antal/tp
ALLEVYN Ag Adhesive	66800073	7,5cm x 7,5cm	10
	66800075	10cm x 10cm	10
	66800078	12,5cm x 12,5cm	10
	66800081	17,5cm x 17,5cm	10
ALLEVYN Ag Sacrum	66800094	Small	10
	66800097	Large	10

## Borttagning av förband

För att ta bort ALLEVYN Ag Adhesive, lyft ett hörn av förbandet och dra långsamt tills hela förbandet har avlägsnats från såret. Sakrala förband ska avlägsnas från toppen ner mot analöppningen för att minimera risken för kontaminering.

## Kontraindikationer

- Använd inte förbandet för patienter med känd överkänslighet mot silversulfadiazin eller sulfonamider.
- Eftersom det är känt att sulfonamider kan orsaka kernikerus bör ALLEVYN Ag Adhesive inte användas för gravida kvinnor nära eller vid fullgången graviditet, ammande kvinnor eller prematura och nyfödda under de första levnadsmanaderna.

## Försiktighetsåtgärder

- Endast för utvärtes bruk.
- Använd inte ALLEVYN Ag Adhesive med oxiderande ämnen som hypokloritlösningar (t.ex. Eusol) eller väteperoxid, eftersom sådana medel kan bryta ner det absorberande polyuretanet i förbandet.
- Det kan hända att ALLEVYN Ag Adhesive inte är kompatibelt med antimikrobiella medel för lokalt bruk.
- Vid klinisk infektion ersätter lokal behandling med silver inte systemisk behandling eller annan adekvat infektionsbehandling.
- Liksom alla vidhäftande produkter kan förbandet ge irritation och/eller maceration av huden runt sårområdet. Om rodnad eller överkänslighetsreaktion uppstår ska behandlingen avbrytas och sjukvårdspersonal rådfrågas.
- Observera att olämplig användning eller alltför täta förbandsbyten, särskilt på patienter med skör hud, kan leda till hudskador.
- Undvik kontakt med elektroder eller ledande geler vid undersökningar som EEG (elektroencefalogram) och EKG (elektrokardiogram).
- När ALLEVYN Ag Adhesive används på en patient under MRT (magnetresonanstomografi) kan patienten uppleva en viss värmekänsla.
- ALLEVYN Ag Adhesive är inte kompatibelt med oljebaserade produkter som vaselin.
- Enbart ALLEVYN Ag Adhesive bör inte användas på sårkaviteter men kan användas som sekundärförband över sårkaviteter.
- Liksom för alla produkter som innehåller silversulfadiazin ska följande försiktighetsåtgärder tillämpas, särskilt när förbandet används för att täcka en stor yta:
  - laktta försiktighet för patienter med kraftigt nedsatt lever- eller njurfunktion.
  - laktta försiktighet för personer med känd glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist.
  - Effekten av systemiskt administrerade läkemedel kan påverkas. Det gäller särskilt orala hypoglykemiläkemedel och fenytoin. För patienter som tar dessa läkemedel rekommenderar vi att halterna i blodet övervakas eftersom läkemedlets effekt kan förstärkas.
- ALLEVYN Ag Adhesive är endast avsett för engångsbruk.

## Referenser

1. Data on file report: 0603003 Comparison of the permeability of old ALLEVYN Adhesive and new modified ALLEVYN Adhesive, David Foster March 2006.
2. Data on file reference 0702002, ALLEVYN Ag Adhesive dressing physical properties. Daubney L, Feb 2007.
3. Bale S, Squires D, Varnon T, Walker A, Benbow M, Harding KG. A comparison of two dressings in pressure sore management. J Wound Care 1997; 6(10): 463 – 466.
4. The clinical and physical properties of ALLEVYN Ag dressings and the moist wound environment.
5. Data on file 0703014 – Antimicrobial activity of ALLEVYN Ag Adhesive over 7 days. E. Woodmansey March 2007.
6. Data on file 0703013 – Bacterial barrier testing (wet-wet) on samples of ALLEVYN Ag Adhesive dressing with a 7 day test duration against MRSA. E Woodmansey, Feb 2007.
7. A human repeat insult patch test with adhesive materials. Inveresk Research International Report No. 3524, June 1986.
8. Quinlan D et al. A multi-centre pilot study to investigate the physical performance of a novel ALLEVYN Adhesive dressing. Smith & Nephew Clinical Trial report SR/00000/CT9336.
9. Data on file 0707052 Antimicrobial activity of ALLEVYN Ag adhesive dressings against a broad spectrum of wound pathogens using a dynamic shake flask. Driffield K. July 2007.

ALLEVYN - Proud to put people first

For patients. For budgets. For today.®

Wound Management  
Smith & Nephew  
Kråketorpsgatan 20  
431 22 Mölndal  
Sverige

www.smith-nephew.com

\*Varumärke från Smith & Nephew  
© Smith & Nephew januari 2014  
14-01525-SE



Licensed by Eucomed

T +46 (0) 31 746 58 00  
F +46 (0) 31 87 05 31