

Bruksanvisning InternKontroller Urinstickor

MAS[®] UA DipTube

Kontrollerna är flytande och klara att använda

De finns i två olika Provrör, som skall förvaras i kylskåp

- ✓ **Level 1 – negativ / normal nivå**
- ✓ **Level 2 – positiv / abnormal nivå**

Det finns också en Bipacksedel med rekommenderade resultat för "ditt instrument" angivet i Arbiträra enheter (neg, 1+,2++ osv.) och SI enheter (mmol/L, Leu/uL osv.)

Hållbarheten på öppnade kontroller står på utsidan av röret (Expiration Date)

Hållbarheten på kontrollerna när du öppnat korken är

- ✓ 8 veckor eller 20 "doppningar" vid förvaring i kyl
- ✓ (alternativt 2 veckor eller 10 "doppningar" vid förvaring i rumstemperatur)

Gör så här:

1. **Ta fram** kontrollprovrören från kylskåpet och låt dem få rumstemperatur (15 min)
2. **Blanda/vänd** kontrollprovrören i minst 3 minuter (gärna på vagga)
3. **Doppa/ analysera** en urinsticka i kontrollprovrör märkt **Level 1** på precis samma sätt som du analyserar patient urinprov
4. **Läs av** resultatet på samma sätt som du gör med ett patient urinprov – **och jämför** med de rekommenderade resultat som är angivna för Ditt instrument i Bipacksedeln
5. **Upprepa** sedan på samma sätt med kontrollprovrör märkt **Level 2**
6. Efter att du analyserat klart – **sätt på korkarna och ställ tillbaka** kontrollerna i kylan
7. Behöver du kontrollera Graviditets tester, Mikroalbumin eller Kreatinin – kan du använda dessa kontrollprovrör – och du analyserar då kontrollerna på precis samma sätt som du analyserar dina patient urinprov
Du jämför dina resultat med de rekommenderade resultat du finner i Bipacksedeln

Mina resultat stämmer inte – vad kan det bero på?

- ✓ Har du blandat kontrollprovrören ordentligt, och har de fått rumstemperatur?
- ✓ Har du använt kontrollerna längre än de är hållbara, eller är de förorenade?
- ✓ Resultaten på Level 2 kan variera något under tid, och kan skilja med "ett plus(+)" mer eller mindre från dag till dag

