



ATOS MEDICAL

Leading the way in ENT

Atos Medicals produkter och expertis utvecklas i nära samarbete med ledande institutioner, läkare, forskare, logoped och patienter över hela världen. Alla fakta och argument bygger på resultat från kliniska studier. 1987 började Atos Medical utveckla den första Provox röstventilen. Vi har sedan dess arbetat intensivt för att utveckla Provox till att bli marknadens ledande system för röst- och lungrehabilitering. Vi fortsätter med att avsätta stora resurser på produktutveckling och utbildningsprogram inom öron- näs- och halsspecialiteten. Vi har ett tydligt mål: Atos Medical ska även i framtiden vara ledande inom hela detta specialismråde.

Provox® StabiliBase™

Det nya plåstret som sitter längre



1. Dra bort den mellersta delen av skyddspapperet. **



2. Fäst den mellersta delen på stomaplåstret centrerat över stomat. Massera det ordentligt.



3. Stötta basen och dra bort den ena sidodelen. Massera ordentligt, upprepa sedan proceduren på den andra sidan.



4. Massera hela plåstret ordentligt mot huden.



5. Sätt på HME-kassetten.

** Vänligen läs manualen innan användning.



Orderinformation

Provox StabiliBase Adhesive	15 st/box	7289
Provox StabiliBase Adhesive	1 st/box	7299

Provox® is a registered trademark owned by Atos Medical AB, Sweden. Provox StabiliBase is protected by several patents pending.



Välkommen till
www.atosmedical.se

- patient- och produktfilmer,
- patienters berättelser,
- kontaktinformation till röstklubbar,
- ... och mycket mer.

Huvudkontor

Atos Medical AB
P.O. Box 183, SE-242 22 Hörby, Sweden
Tel: +46 (0)415 198 00
Fax: +46 (0)415 198 98
info@atosmedical.com
www.atosmedical.com

© Atos Medical AB, Sweden. 201201A, MC0767-ThSE

Svenska

ATOS
MEDICAL
Leading the way in ENT

PROVOX® StabiliBase™ Det nya plåstret som sitter längre


Det nya Provox StabiliBase plåstret är speciellt utformat för att förbättra komforten när man använder en HME- kassett, FreeHands HME (automatisk talventil) eller en annan produkt från Provox systemet.

Det har flera fördelar som ger en bra passform och stabilitet under tal.

1. Längre vidhäftning och tal*

Klinisk studie visar att Provox StabiliBase satt kvar betydligt längre och behövde inte bytas lika ofta som FlexiDerm eller XtraBase. Det rapporterades att det var lika lätt att ta bort StabiliBase som de andra plåstren.

Användare av FreeHands rapporterade att med StabiliBase kunde de använda sin FreeHands enhet betydligt fler timmar än med FlexiDerm eller XtraBase.

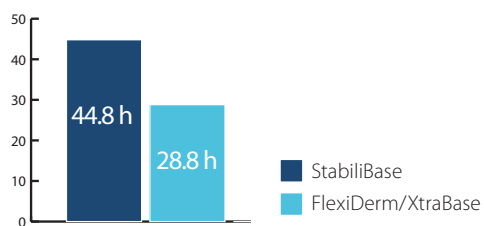

Genomsnittlig vidhäftningstid i timmar per användare.

Färre byten krävs


På grund av den längre vidhäftningstiden, så är antalet plåster per box färre.



2. Komfort och passform*

Provox StabiliBase har en konvex utformning med stabiliseringskenor vilket ger en bra passform mot stomat, i synnerhet för användare med ett djupt stoma.


Majoriteten av användarna ansåg att StabiliBase var bekväm och hade en bra passform mot stomat.

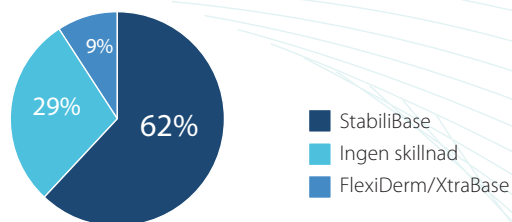

Vilket plåster passar bäst för ditt stoma?

3. Provox StabiliBase - det föredragna valet*

Överlag föredrog majoriteten av deltagarna i den kliniska studien StabiliBase plåstret.

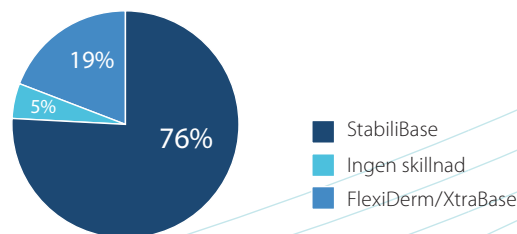

*Datauppgifter. I studien jämförs Provox StabiliBase mot FlexiDerm / XtraBase.



Fördelar*

För de flesta användare kan Provox StabiliBase erbjuda:

- Längre vidhäftningstid och lättare att avlägsna
- Enklare fastsättning tack vare det innovativa 3-delade skyddspapperet.
- Fler timmar av tal med automatisk talventil (Provox FreeHands HME)
- En bra och komfortabel passform för alla stomat, även för djupa.

