



Flexdynan

Dynan är tillverkad i noga utvald trögskum och finns i två storlekar. Den avfasade är till för tyngre brukare (ca. 85-130kg) och den andra för lättare brukare.

Flexdynan används i trycksårspåbyggande syfte och har många användningsområden. Dynan kan användas från start i patient-säng redan innan eventuell rodnad uppstått samt hos patienter där man kan se risk för trycksår. Kompletterar den förebyggande madrassen när det behövs en extra trycksårspåbyggande åtgärd.

Används med fördel hos patienter som bedöms ha risk att utveckla trycksår. Kan användas hos patienter där rodnad uppstått på hæl, fotknölar eller på andra tryckkänsliga områden från underben till fot/hälar. Flexdynan läggs under underben/hälar med fasade delen av dynan upp mot knävecken. Hälen ska vila på dynan. Kan användas då hälen ska hänga fritt men då måste t.ex. en kudde placeras under dynan för att få lite mera höjd. Kan kompletteras med slide/glidmatta ovanpå då extra rörlighet efterfrågas, detta minskar dock den tryckavlastande effekten något. Används när patient fått spinalbedövning. Kan också användas hos patienter med smärtproblematik som avlastande, komfortabel dyna, där det uppstår smärta vid vissa lägespositioner.

Information

Brandstandard

Flexdynan är testad och uppfyller SS 876 00 01, testmetod NT-Fire 037 A+B.

Märkning

Tilv. år, månad, vecka

Garanti

1 år

Tillverkningsland

Sverige

Skötsel

Se symboler nedan, samt skötselinformation som följer med produkten.

Art nr

5044
5047-A

Storlek (LxBxH)

80 x 50 x 4
80 x 55 x 7
(3cm hög på avfasade delen)

Färg

Plan
Fasad

Skrotningsanvisning

Flexdynan är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.



DENNA PRODUKT ÄR MED I VÅRT POSITIONERINGSSORTIMENT.

