



# Trach-Vent<sup>®</sup> +

**Fuktvärmeväxlare för tracheotomerade barn och vuxna som spontanandas.  
Lämplig för träning ur respirator.**

- Tidalvolym: kan användas av både vuxna och barn
- Dead-space 10 ml
- Vikt 6,3 g
- Kopplingar 15 mm standardkoppling ISO5356-1
- Medium: Hygroskopiskt, naturligt mikrowellpapper  
Bakteriostatiskt
- Flödesmotstånd:  
vid 30 l / min - max 0,25 cm H<sub>2</sub>O
- Vattenförlust: vid V<sub>T</sub> 500 ml - 9,5 mg H<sub>2</sub>O / l luft
- Befuktningseffektivitet:  
vid V<sub>T</sub> 500 ml - 29,2 mg H<sub>2</sub>O / l luft  
Testmetod: ISO 9360, version 2000
- Förpackning: Enstycksförpackade  
Avdelningsförpackning: 50 st,  
Transportförpackning: 500 st
- LOT-nummer finns på samtliga förpackningsenheter
- Svensk instruktion/bruksanvisning i varje avdelningsförpackning
- Latexfri

#### **OBS!**

- Byte rekommenderas var 24:e timme
- Byt fuktvärmeväxlare vid tecken på obstruktion
- Endast för engångsbruk
- Beakta systemets totala dead-space före användning

#### **Kontraindikationer!**

- Trach-Vent<sup>®</sup> + ska inte användas på patienter med kraftig sekretutsöndring i luftvägar och lungor.
- Trach-Vent<sup>®</sup> + ska inte användas i samband med aktiva befuktare eller vid nebulisering.
- Förfukta inte.

#### **Artikelnummer:**

HU-41312      Hygienförp.

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

#### **För mer information / Order**

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)

Produkt	Material	Vikt i gram	Rest efter förbränning
Hylsa	Polypropen	4,4	Koldioxid och vatten
Medium	Papper, impregnerat med CaCl <sub>2</sub>	1,6	Koldioxid och vatten
Ventil	Silikon	0,3	Silikondioxid SiO <sub>2</sub>
Förpackning - ytterkartong			
A) Övre delen	Papper	0,2	Koldioxid och vatten
B) Nedre delen	Flerskikts plastfilm av Polyeten-copolyamid	0,6	Koldioxid och vatten och Kväveoxid (< 1,7 % av volymen, 2,7 % av vikten)
Avdelningsförpackning	Papper	107,0	Koldioxid och vatten
Transportförpackning	Papper	537,0	Koldioxid och vatten

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

**För mer information / Order**

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)

2015-10