

# Verba®/Verba® E

Elastiskt stödbandage

Vid bukoperationer och andra större ingrepp i området kring bålen är det många gånger av vikt att få en tidig mobilisering av patienten. Detta kan vara svårt eftersom såret utsätts för påfrestningar som gör att det går upp. Verba är då den självklara hjälpen. Genom att ge stadga åt både bålen och såret så kan patienten komma på benen inom kortast möjliga tid.



1 Stadig

2 Lätt att justera

3 Enkel att ta på

## Fördelar:

Enkel att hantera  
Flera användningsområden  
Bekväm att bära  
Ekonomisk, sparar tid



## Egenskaper

Bandaget är elastiskt på längden och stabilt på tvären vilket ger en jämn tryckfördelning över hela ytan. Verba hindrar inte patientens andning vid kraftig kompression. Den höga stabiliteten på tvären gör att bandaget sitter stadigt utan att det bildas besvärande veck och ojämnheter. Verba är enkel att använda. Patienten behöver inte lyftas upp, vilket är nödvändigt vid lindning av bindor, och belastningen på patient och vårdpersonal minskar. Kardborreförslutningen underlättar byte av sårförbandet. Kardborrebandet ger en extra inställningsmarginal på upp till 10 cm i alla bandagestorlekar. Tack vare detta kan Verba alltid ställas in exakt och med individuell kompression. Om längre bandage behövs kan flera Verba sättas ihop. Färgranden på bandaget markerar tydligt storleken och underlättar sortering efter tvätt. Det går att klippa hål i Verba för att frilägga stomin vid behandling av stomibråck eller för att anpassa bandaget efter kroppsform.

## Material

Verba: 41% polyamid, 33% bomull, 18% viskos och 8% polyuretan. Verba E: 60% polyamid, 20% viskos och 20% elasthan. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

## Indikation

För postoperativ vård efter thorax- och bukoperationer, för avlastning av sår. Förhindrar uppsprickning av ärr vid tidig mobilisering. Vanliga bråck, stomibråck och ryggskott.  
Kontraindikationer: Inga kända.

## Fixeringsanvisning

1. Sätt gördel på plats.
2. Spänn till önskat stöd.
3. Fixera gördeln med kardborrebandet mitt fram.

## Tvättråd

Verba kan tvättas i 95°C ca 10-20 gånger och Verba E upp till 10 gånger. Kardborrebandet ska vara förslutet vid tvätt.



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Mått	Färg	Funktionsmått	Höjd	Art.nr.	Afp	Tfp
Verba® Stycksförpackad	Stl 1	svart	65 - 75 cm	25 cm	932 531	1 st	15 Afp
	Stl 2	gul	75 - 85 cm	25 cm	932 532	1 st	15 Afp
	Stl 3	grön	85 - 95 cm	25 cm	932 533	1 st	15 Afp
	Stl 4	röd	95 - 105 cm	25 cm	932 534	1 st	15 Afp
	Stl 5	blå	105 - 115 cm	25 cm	932 535	1 st	15 Afp
Verba®E Stycksförpackad	Stl 1	grön	65 - 95 cm	25 cm	932 536	1 st	15 Afp
	Stl 2	blå	95 - 115 cm	25 cm	932 537	1 st	15 Afp