

Made in EU

# Magskölningsset

- Svensk bruksanvisning (baksidan av detta produktblad)
- Ger bättre arbetsmiljö
- 5 liters uppsamlingspåse
- Tillverkade för svenska kunder
- 2-liter påse för spolvätska, påfyllningsbar
- Är helt slutet vilket minskar eventuell smittorisk
- Ger möjlighet att använda alla typer av V-sonder
- Har transparent uppsamlingspåse vilket ger möjlighet att se ev. tablettrester etc



**Salubrious**  
Good Medical

Manual på  
baksidan

AAA

Box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige • tel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75  
e-post: [info@salubrious.se](mailto:info@salubrious.se) • hemsida: [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se) • webbshop: [www.goodmedical.se](http://www.goodmedical.se)

# Instruktion

för användning av slutet ventrikelsköljningsset

## Följande behövs för ventrikelsköljning:

- 1 st "Sistema per lavanda gastrica" V-kit II
- Ventrikelsond




Volym övre påse: 2000 ml  
Volym nedre påse: 5000 ml

## Så här gör du:

1. För den vita klämman ända ned till uppsamlingspåsen (5000 ml) och stäng den.
2. För den röda klämman så nära sondanslutningen som möjligt och stäng den
3. Fyll Spolvätskepåsen (2000 ml) önskad mängd vatten (måttenheter finns på påsen).
4. Placera uppsamlingspåsen på golvet med måttskalan synlig.
5. Öppna båda klämmorna och håll en tumme för sondanslutningen och fyll hela slangsetet för att skapa en hävert effekt.
6. Stäng båda klämmorna
7. Anslut sonden.

Ventrikelsköljningssetet är nu färdigt att användas.

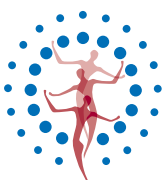

**Salubrious**  
Good Medical

**AAA**

Box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige • tel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75  
e-post: [info@salubrious.se](mailto:info@salubrious.se) • hemsida: [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se) • webbshop: [www.goodmedical.se](http://www.goodmedical.se)